

Najnowsza aktualizacja oprogramowania CaRE

Ważne, by oprogramowanie modelu było na bieżąco aktualizowane, ponieważ pozwala to na uzyskanie najlepszych efektów szkoleniowych. Zaktualizuj oprogramowanie trenażera do badania układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, by już dziś zacząć korzystać z jego udoskonalonych funkcji.

Czy korzystasz z najnowszej wersji oprogramowania CaRE?

1. Połącz swoje urządzenie z modelem CaRE.
2. Otwórz zakładkę „Informacje” w menu ustawień.
3. Sprawdź, z jakiej wersji oprogramowania korzysta Twój model.



4. Jeżeli wyświetlona zostanie najnowsza wersja oprogramowania, nie trzeba wykonywać żadnych dalszych czynności.

Mam starą wersję oprogramowania. Jak je zaktualizować?

1. Połącz swoje urządzenie z lokalną siecią Wi-Fi.

Aktualizacja oprogramowania CaRE

2. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania, korzystając z podanego powyżej linku.
3. Po zakończeniu pobierania ponownie połącz swoje urządzenie z modelem CaRE.
4. W ustawieniach otwórz zakładkę „Aktualizacje” i naciśnij „Wybierz plik”.
5. W wyskakującym oknie eksploratora plików wyszukaj i wybierz plik najnowszej wersji oprogramowania, a następnie naciśnij „Otwórz”.
6. W zakładce „Aktualizacje” naciśnij „Wczytaj”.

Po wczytaniu pliku

Uwaga: Proces aktualizacji może zająć do 15 minut.


Po rozpoczęciu aktualizacji zauważysz, że model CaRE nie pojawia się już na liście dostępnych sieci Wi-Fi. Podczas procesu aktualizacji pozostanie on offline. Gdy trenażer ponownie pojawi się na liście dostępnych sieci Wi-Fi, możesz ponownie połączyć swoje urządzenie z trenażerem.

Aktualizacja oprogramowania LimbPAD

1. Połącz urządzenie LimbPAD z modelem CaRE (Uwaga: należy upewnić się, że urządzenie LimbPAD jest naładowane i odłączone od ładowarki).
2. Jeżeli urządzenie pomyślnie się połączy bez żadnego powiadomienia w wyskakującym oknie, nie trzeba wykonywać żadnych dalszych czynności.

Dostępna jest aktualizacja LimbPAD

1. Jeżeli urządzenie LimbPAD nie korzysta z najnowszej wersji oprogramowania, pojawi się powiadomienie w wyskakującym oknie (przedstawione poniżej).

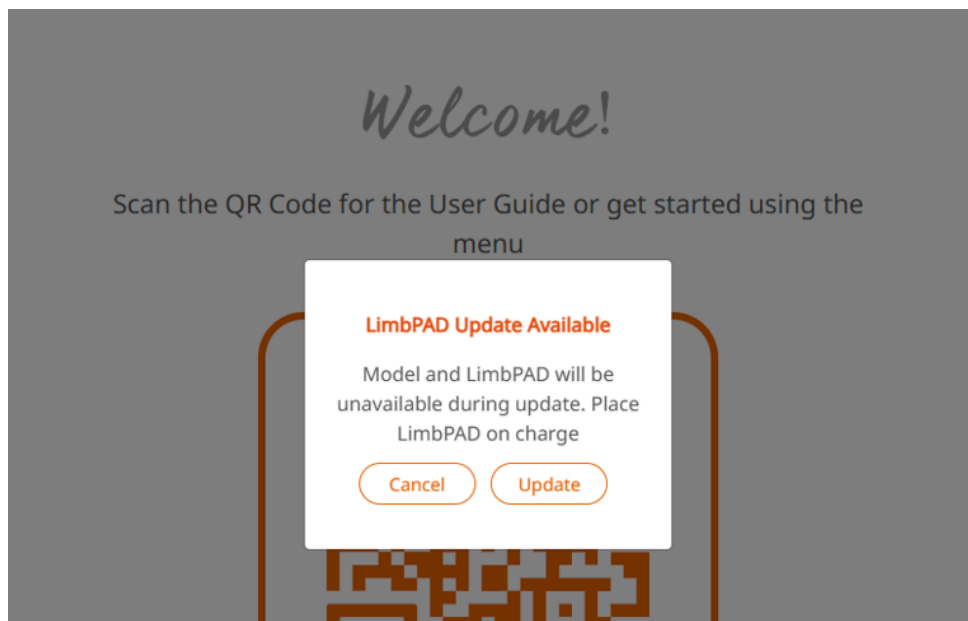

2. Naciśnij „Aktualizuj”.
3. Dioda LED urządzenia LimbPAD zacznie mrugać na niebiesko (Uwaga: jeżeli dioda urządzenia LimbPAD nie zacznie mrugać, należy zrestartować LimbPAD i ponownie wybrać „Aktualizuj”).
4. Po 5-10 minutach dioda urządzenia LimbPAD zacznie mrugać na różowo, co oznacza zakończenie aktualizacji.

[Masz problemy z aktualizacją? Skontaktuj się z lokalnym zespołem pomocy.](#)