

Es importante que mantenga su simulador actualizado para obtener la mejor experiencia de aprendizaje posible. Actualice el software de su Simulador de la exploración de los sistemas respiratorio y cardiovascular, y empiece a utilizar sus funciones mejoradas hoy mismo.

¿Está actualizado su software CaRE?

1. Conecte su dispositivo al simulador CaRE.
2. En el menú de ajustes, abra la pestaña "Acerca de".
3. Compruebe la versión de software que hay instalada en su simulador.



4. Si la versión de software indicada es la última, no tiene que hacer nada más.

Mi software está desactualizado, ¿cómo lo actualizo?

1. Conecte su dispositivo a su red Wi-Fi local.

Actualización del software CaRE

2. Descargue la última versión con el enlace anterior.
3. Una vez descargada, conecte su dispositivo al simulador CaRE.
4. En los ajustes, abra la pestaña "Actualizaciones" y pulse "Elegir archivo".
5. En la ventana emergente del Explorador de archivos, busque y seleccione la última versión del archivo de software, y pulse "Abrir".
6. En la pestaña "Actualizaciones", pulse "Cargar".

Tras cargar el archivo

Nota: El proceso de actualización puede tardar hasta 15 minutos.


Cuando empiece la actualización, notará que el simulador CaRE ya no aparece en sus redes Wi-Fi disponibles. Permanecerá inhabilitado durante el proceso de actualización. Cuando vuelva a aparecer el simulador en sus redes Wi-Fi disponibles, podrá volver a conectarlo con su dispositivo.

Actualización de software LimbPAD

1. Conectar un LimbPAD al simulador CaRE (Nota: asegurarse de que el LimbPAD esté cargado y desconectado del cargador).
2. Si el dispositivo se conecta correctamente sin que aparezca ningún mensaje emergente, no es necesario hacer nada más.

Hay disponible una actualización de LimbPAD.

1. Si el LimbPAD no está actualizado, aparecerá un mensaje emergente (como muestra la imagen de más abajo).

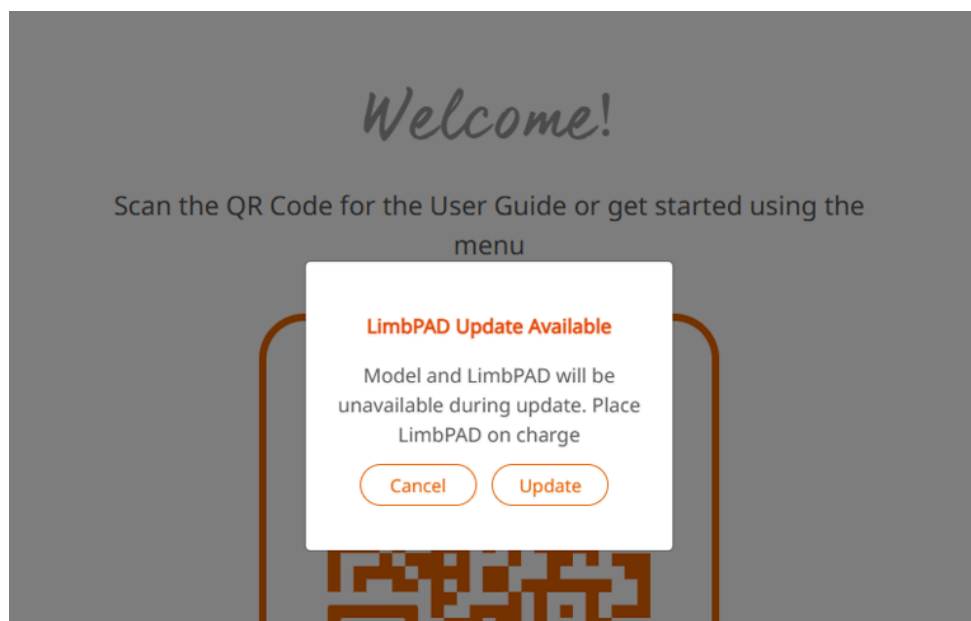

2. Pulse "Actualizar".
3. El azul LED del LimbPAD empezará a parpadear (Nota: si el LimbPAD no empieza a parpadear, reinicielo y vuelva a seleccionar "Actualizar").
4. Al cabo de 5-10 minutos, empezará a parpadear la luz rosa del LimbPAD, y la actualización se habrá completado.

¿Tiene algún problema con la actualización? Póngase en contacto con su equipo local para obtener asistencia.