

È importante tenere aggiornato il modello per sfruttare la migliore esperienza didattica. Aggiorna il software del trainer Cardiovascular and Respiratory Examination (CaRE) e inizia a utilizzare subito le funzionalità migliorate.

Il tuo software CaRE è aggiornato?

1. Collega il tuo dispositivo al modello CaRE
2. Apri la scheda "Informazioni" nel menu delle impostazioni
3. Controlla la versione del software in uso nel modello



4. Se è indicata l'ultima versione del software, non sono necessarie altre azioni

Il mio software non è aggiornato, come lo aggiornano?

1. Collega il dispositivo alla rete WiFi locale

[Aggiornamento software CaRE](#)

2. Scarica l'ultima versione utilizzando il link sopra
3. Dopo averla scaricata, ricollega il tuo dispositivo al modello CaRE
4. Nelle impostazioni, apri la scheda "Aggiornamenti" e premi "Scegli file"
5. Nella finestra pop-up File Explorer, trova e seleziona l'ultima versione del software e premi "Apri"
6. Nella scheda "Aggiornamenti" premi "Carica"

Dopo il caricamento del file

Nota: la procedura di aggiornamento può richiedere fino a 15 minuti.


Quando inizia l'aggiornamento, noterai che il modello CaRE non compare più nelle reti WiFi disponibili. Durante la procedura di aggiornamento, rimane offline. Quando il trainer ricompare nelle reti WiFi disponibili, è possibile ricollegare il dispositivo al trainer.

Aggiornamento software LimbPAD

1. Collegare un LimbPAD al modello CaRE (nota: accertarsi che LimbPAD sia caricato e disconnesso dal caricabatterie)
2. Se il dispositivo si collega correttamente senza notifiche pop-up, non sono necessarie altre azioni

Aggiornamento LimbPAD disponibile

1. Se LimbPAD non è aggiornato, compare una notifica pop-up (come mostrato sotto)

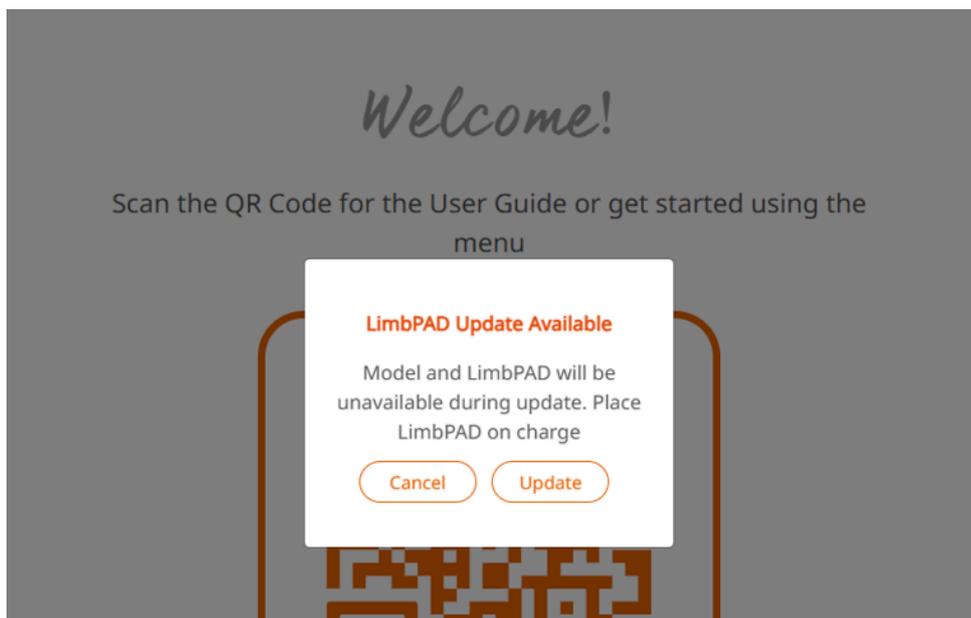

2. Premere "Aggiorna"
3. Il LED di LimbPAD inizia a lampeggiare in blu (nota: se LimbPAD non inizia a lampeggiare, riavviarlo e selezionare di nuovo "Aggiorna")
4. Dopo 5-10 minuti LimbPAD inizierà a lampeggiare in rosa e a quel punto l'aggiornamento è completato

[Hai problemi con l'aggiornamento? Contatta il team locale per ricevere assistenza.](#)