

Dernière mise à jour du logiciel CaRE

Nous vous recommandons de mettre à jour votre simulateur afin de bénéficier d'une expérience d'apprentissage optimale. Mettez à jour le logiciel de votre simulateur d'examens cardiovasculaires et respiratoires et commencez à utiliser ses fonctionnalités améliorées dès aujourd'hui.

Votre logiciel CaRE est-il à jour ?

1. Connectez votre appareil au simulateur CaRE.
2. Ouvrez l'onglet « À propos » dans le menu des réglages.
3. Vérifiez la version du logiciel utilisée par votre simulateur.



The screenshot shows the top navigation bar of the CaRE software. On the left is the 'limbs&things' logo with the tagline 'CLOSER TO LIFE'. On the right are two icons: a person with a percentage sign and a close button (X). Below the navigation bar is a user profile menu with the following options: 'CONNECTER LIMBPAD', 'GESTION DU MOT DE PASSE', 'MÉMOIRE', 'LANGUES', 'À PROPOS' (highlighted in orange), and 'NUMÉRO DE SÉRIE - VERSION DU LOGICIEL -'. In the center of the screen, there is a 'Bienvenue!' message and instructions: 'Scanner le QR code pour ouvrir le Guide d'utilisation ou passez par le'. On either side of this text are line-art illustrations of a human head and neck.

4. S'il s'agit de la dernière version du logiciel, aucune action supplémentaire n'est nécessaire.

Mon logiciel est obsolète, comment puis-je procéder à sa mise à jour?

1. Connectez votre appareil à votre réseau WiFi local.

Mise à jour du logiciel CaRE

2. Téléchargez la dernière version en utilisant le lien ci-dessus.
3. Une fois le téléchargement terminé, reconnectez votre appareil au simulateur CaRE.
4. Dans les réglages, ouvrez l'onglet « Mises à jour » et appuyez sur « Choisir fichier ».
5. Dans la fenêtre contextuelle de l'explorateur de fichiers, recherchez et sélectionnez la dernière version du fichier du logiciel, puis cliquez sur « Ouvrir ».
6. Dans l'onglet « Mises à jour », cliquez sur « Téléverser ».

Après le téléversement du fichier

Remarque : Le processus de mise à jour peut prendre jusqu'à 15 minutes.


Lorsque la mise à jour commencera, vous remarquerez que le simulateur CaRE n'apparaîtra plus dans la liste des réseaux WiFi disponibles. Il restera hors ligne jusqu'à la fin de la mise à jour. Lorsque le simulateur réapparaît dans la liste des réseaux WiFi disponibles, vous pouvez reconnecter votre appareil au simulateur.

Mise à jour du logiciel LimbPAD

1. Connectez un LimbPAD au simulateur CaRE (remarque : assurez-vous que le LimbPAD est chargé et débranché du chargeur).
2. Si votre appareil se connecte correctement sans notification contextuelle, aucune action supplémentaire n'est nécessaire.

Mise à jour du LimbPAD disponible

1. Si le LimbPAD n'est pas à jour, une fenêtre contextuelle apparaît (comme illustré ci-dessous).

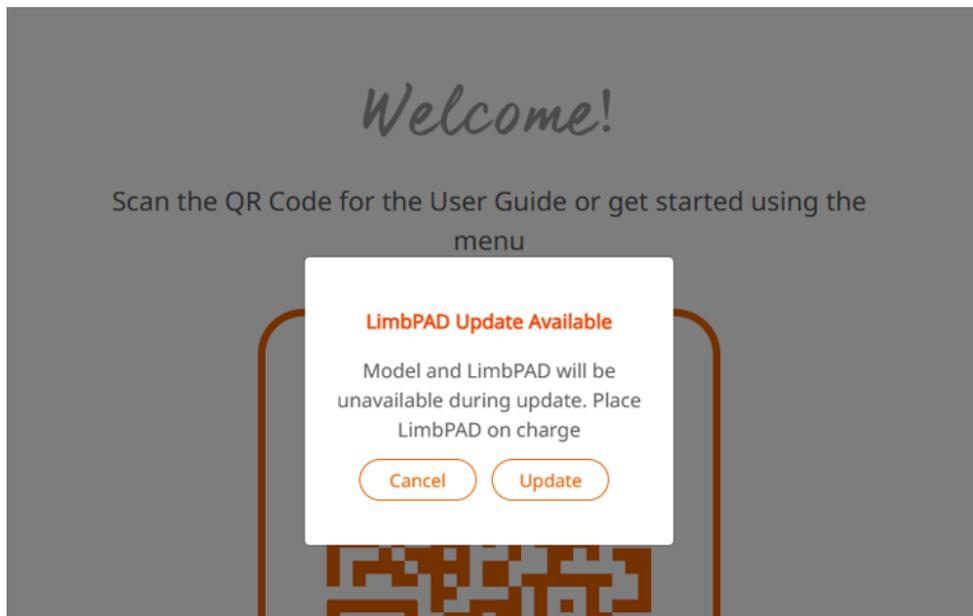

2. Appuyez sur « Mettre à jour ».
3. Le témoin lumineux du LimbPAD se met à clignoter en bleu (Remarque : si le LimbPAD ne se met pas à clignoter, redémarrez-le et sélectionnez à nouveau « Mettre à jour »)
4. Après 5 à 10 minutes, le LimbPAD commence à clignoter en rose et la mise à jour est terminée.

[Vous rencontrez des difficultés avec la mise à jour ? Contactez votre équipe locale pour obtenir de l'aide.](#)