



用户指南

腹部穿刺模型

该产品有两种肤色可供选择，浅色和深色

60100

60111

如果您想了解更多关于技能培训产品请访问：

limbsandthings.com

目录索引

| | |
|----------------|----|
| 产品包含 | 3 |
| 安全与清洁说明 | 4 |
| 组装 | 5 |
| • 添加/拆除内部解剖结构 | 6 |
| • 肠 | 6 |
| • 肝 | 7 |
| • 脾 | 7 |
| • 安装穿刺垫-穿刺垫的使用 | 8 |
| • 加腹水（水） | 9 |
| • 使用大容量补水系统 | 9 |
| 培训 | 10 |
| 使用后的清洁与储存 | 11 |

请观看我们的视频



请访问该网站
limbsandthings.com


或优酷频道
https://list.youku.com/albumlist/show/id_52483167

产品包含

皮肤

60101


60112

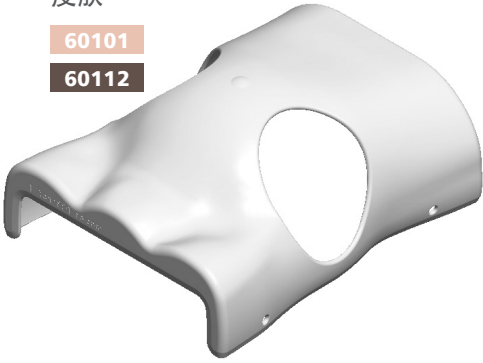

垫 (x2)

60102

60113

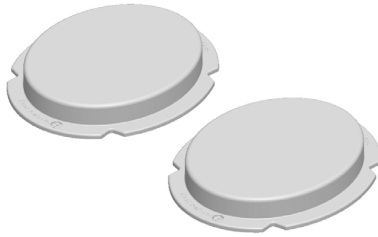


肝

60103



脾

60104

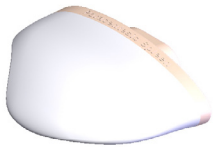


肠插入模块 (x2)

60105



游走肠 (x2)

60106

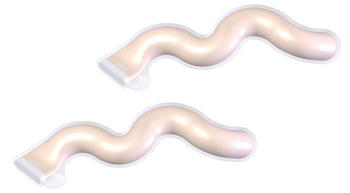

夹紧固定框架 (x2)

60107




大容量补水系统

60108



底座

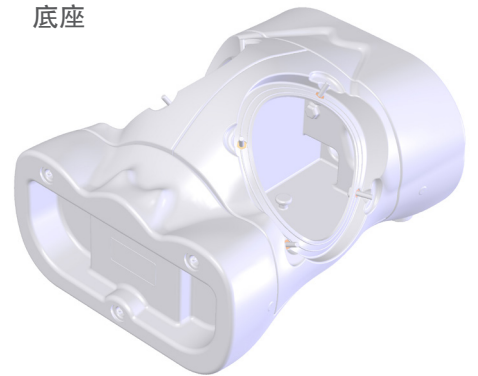

手提箱



安全与清洁指南

在使用腹部穿刺训练器之前请仔细阅读安全说明

可以做



请遵循所有指南。
保留这些指南。
注意所有警告

请只使用 Limbs & Things 指定的附件/配件



如果产品被磨损或损坏，
应由L&T公司进行修复。
请联系您的供应商，
他们将给您提供维修报价

请用湿软布或海绵清洁产品，
请只使用温水和温和中性的清洁剂。



不可以做



请勿将本产品安装在任何热源附近，
不要将其暴露于明火或在裸露的火源附近使用。
请勿在本产品附近或在该产品本身上使用易燃溶剂。

切勿在室外使用本产品，否则可能会对产品造成损坏。



请勿拆卸产品或尝试维修有故障的单元部件，
请将产品退还给 Limbs & Things 进行评估和维修。

请勿让儿童使用此产品



储存与运输



此模型及其配件包装在手提箱中时很重。



此产品在两个腔室都装满水后很重
(增加7公斤重量)



在运输和储存期间，
始终确保产品正确包装和固定，
以防止人身伤害或产品损坏。


组装

您还需要 (未提供)

壶




肾形盘

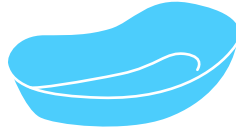


漏斗




腹部穿刺针

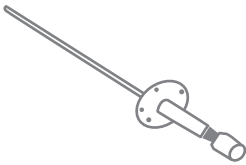


21 号针

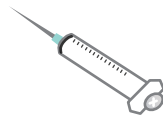

手术刀

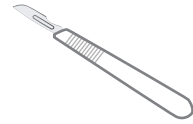

曲线低频探头
(可选)

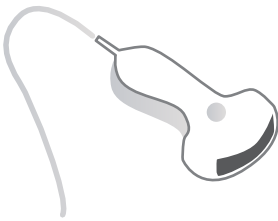

超声波用凝胶
(可选)



肠


60105




60106




1

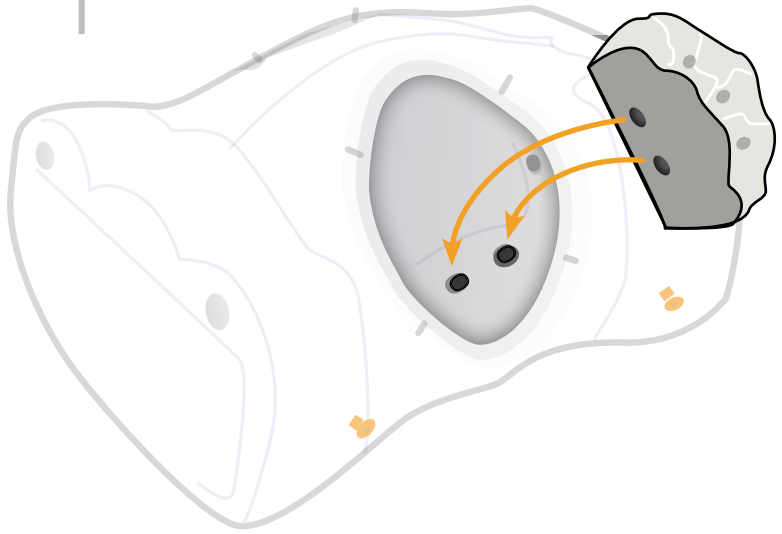

2

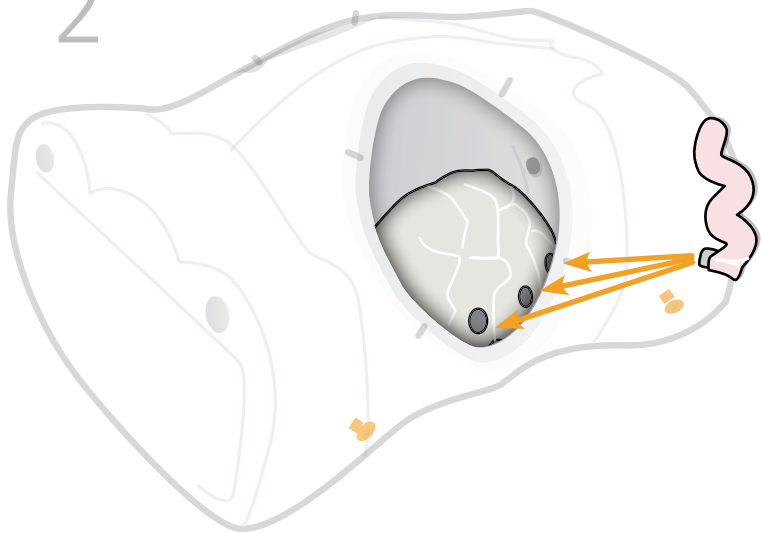

3

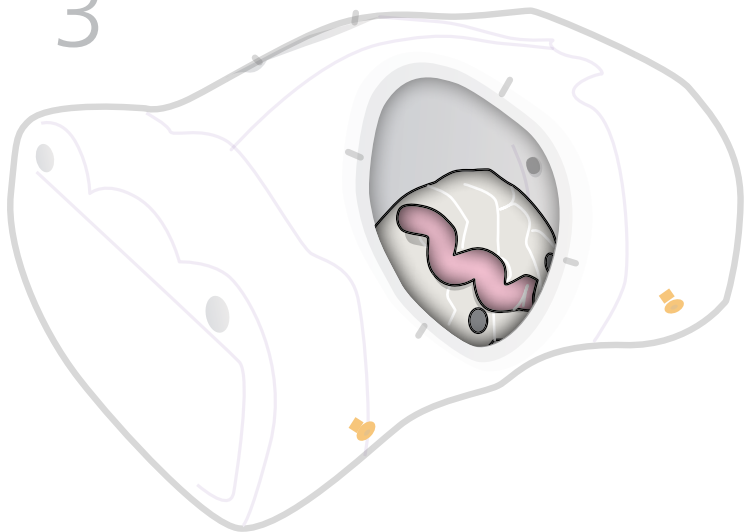


肝

60103



右边

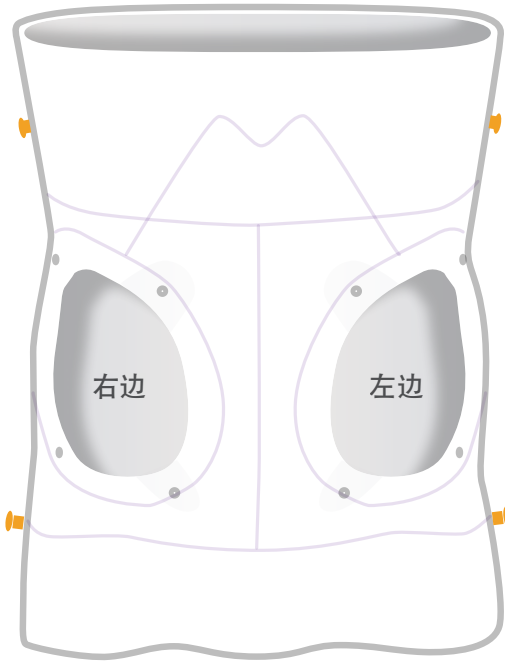



脾

60104




左边

4

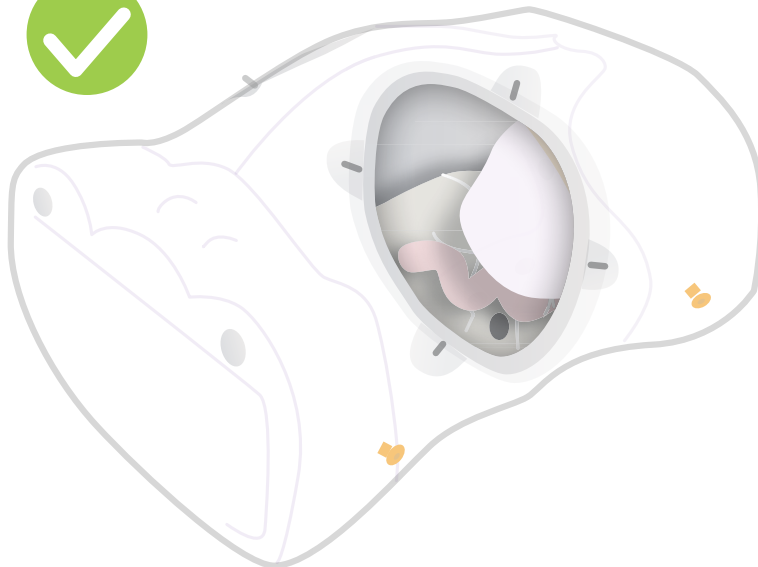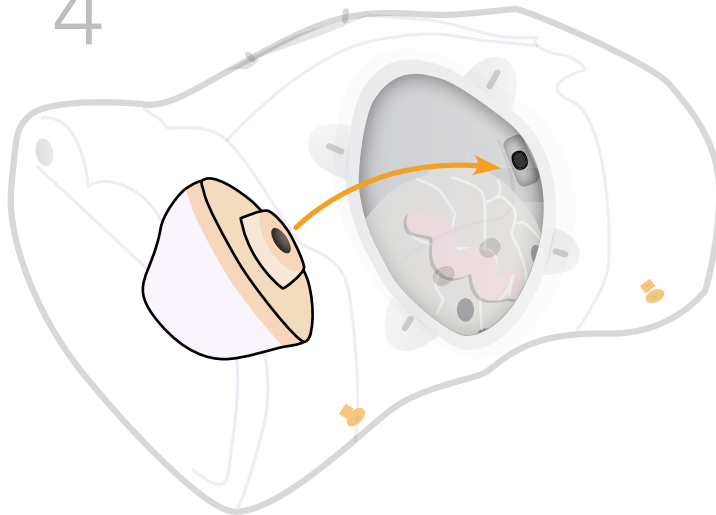



安装穿刺垫

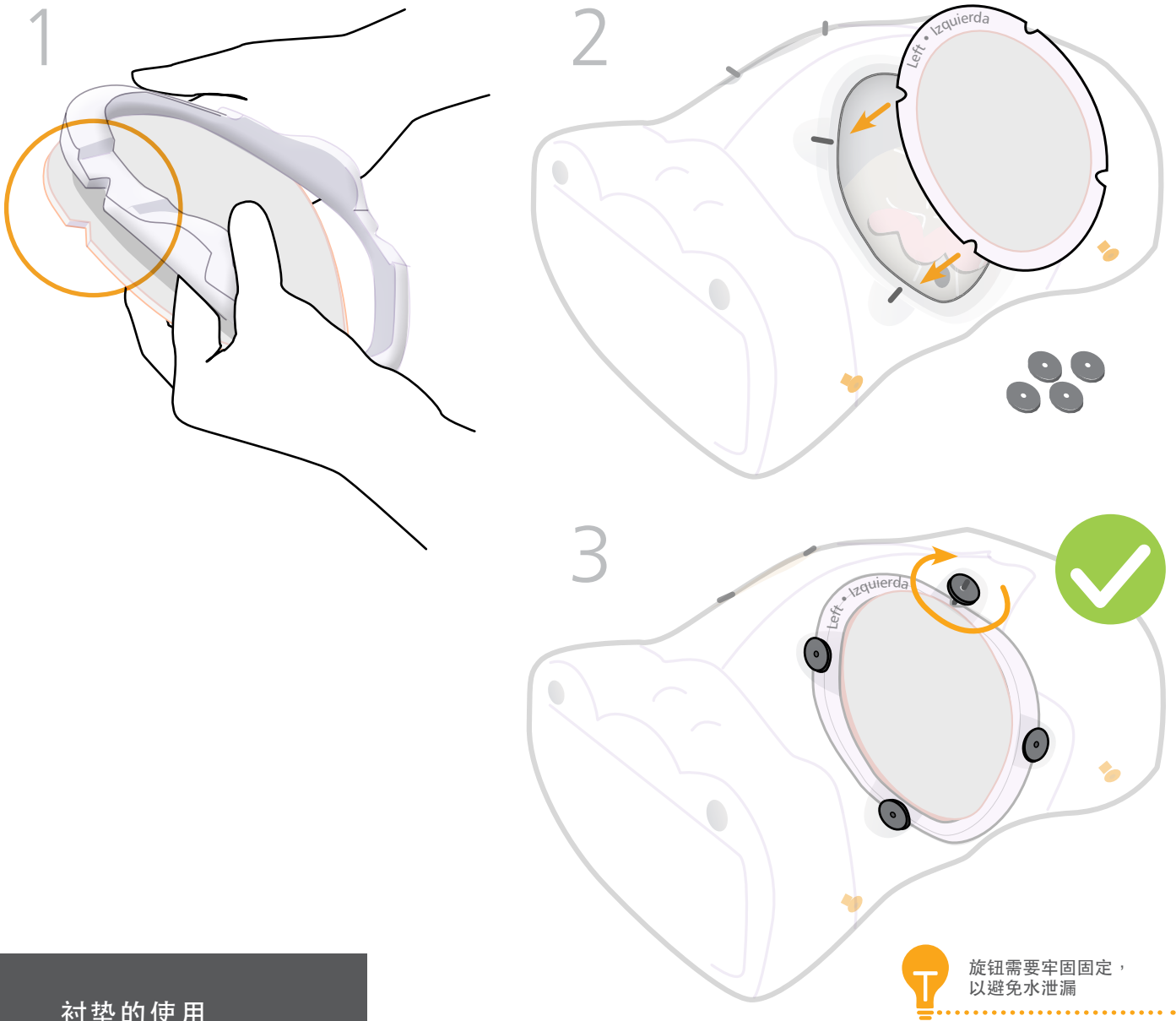


衬垫的使用

每个垫可承受 200 次针穿刺插入

100
次针穿刺插入

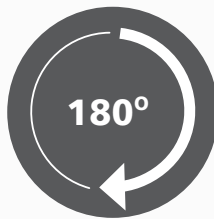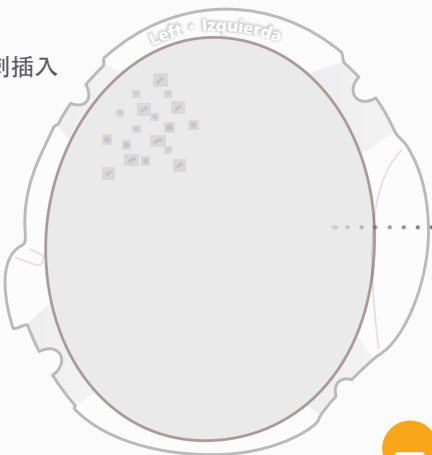


另外
100
次针穿刺插入

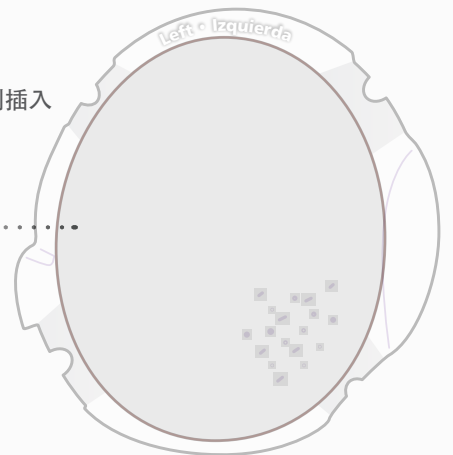



T 在每个衬垫的底部可以看到保质期。
在此日期之后，衬垫的性能可能会降低

添加腹水（水）

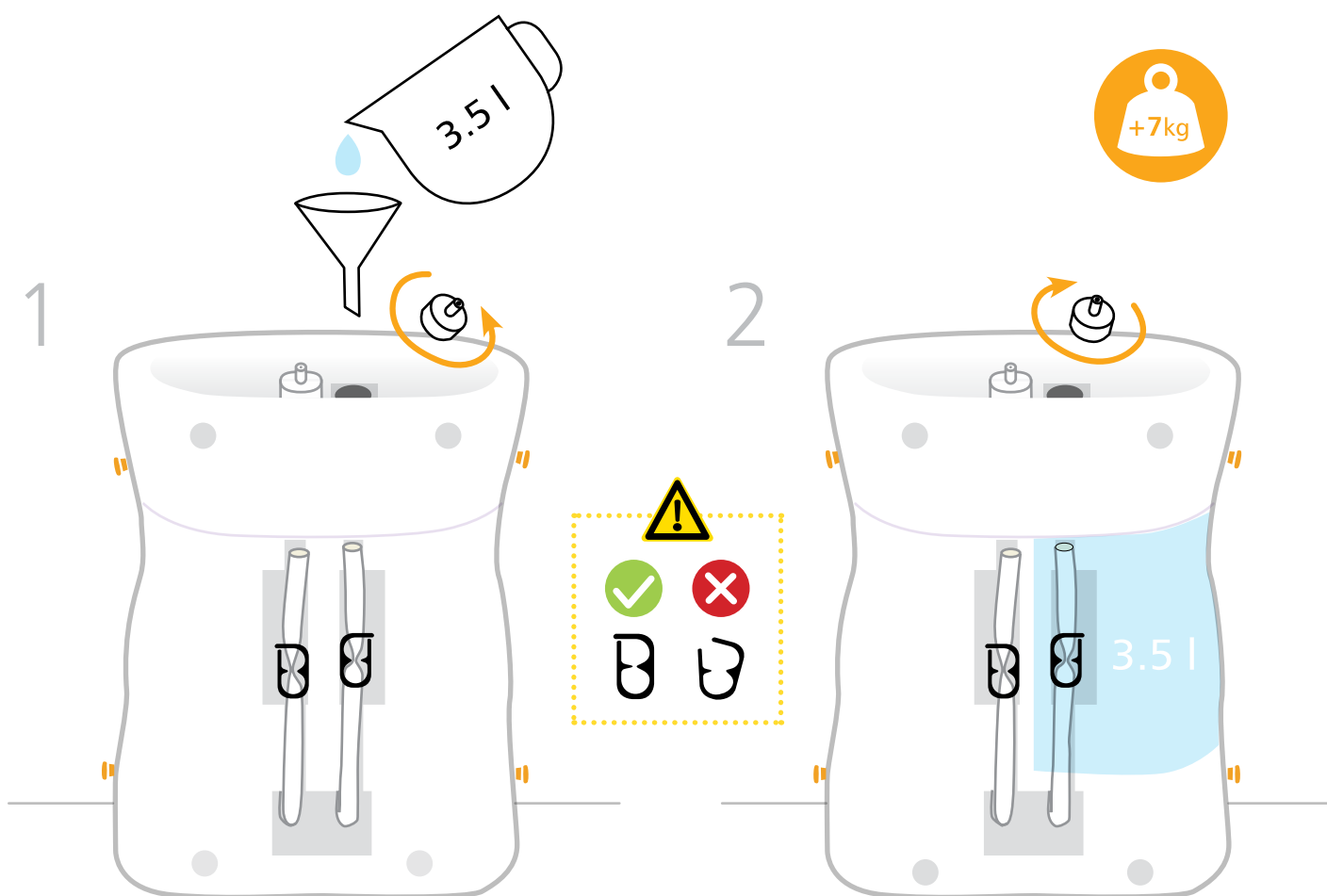

使用大容量补水系统（可选）

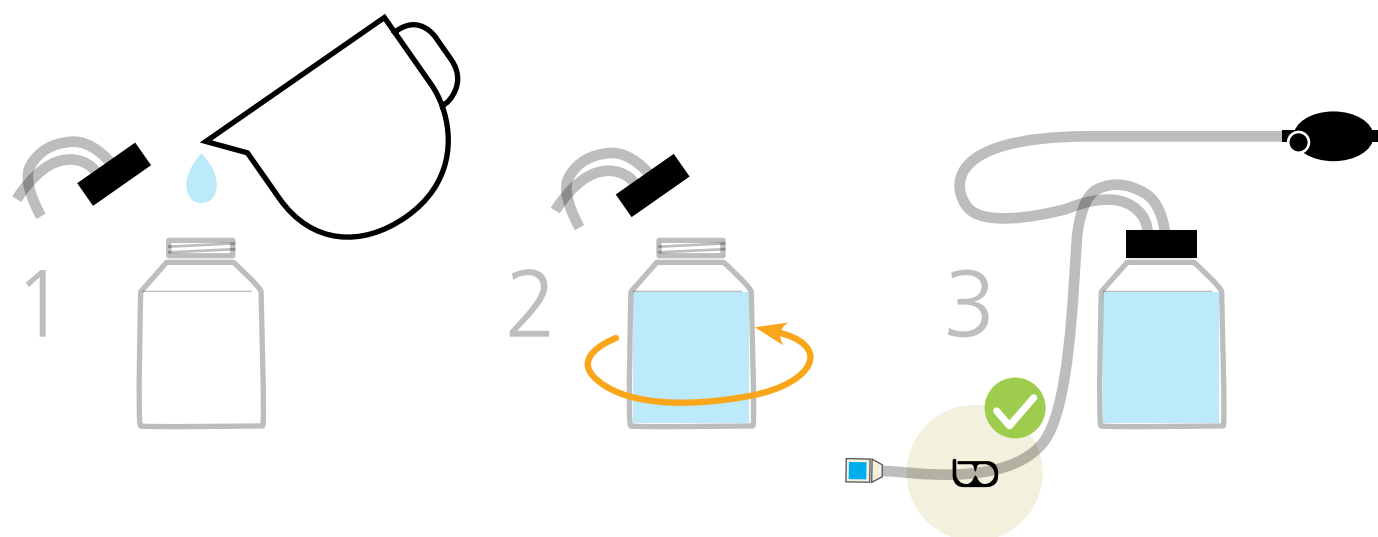

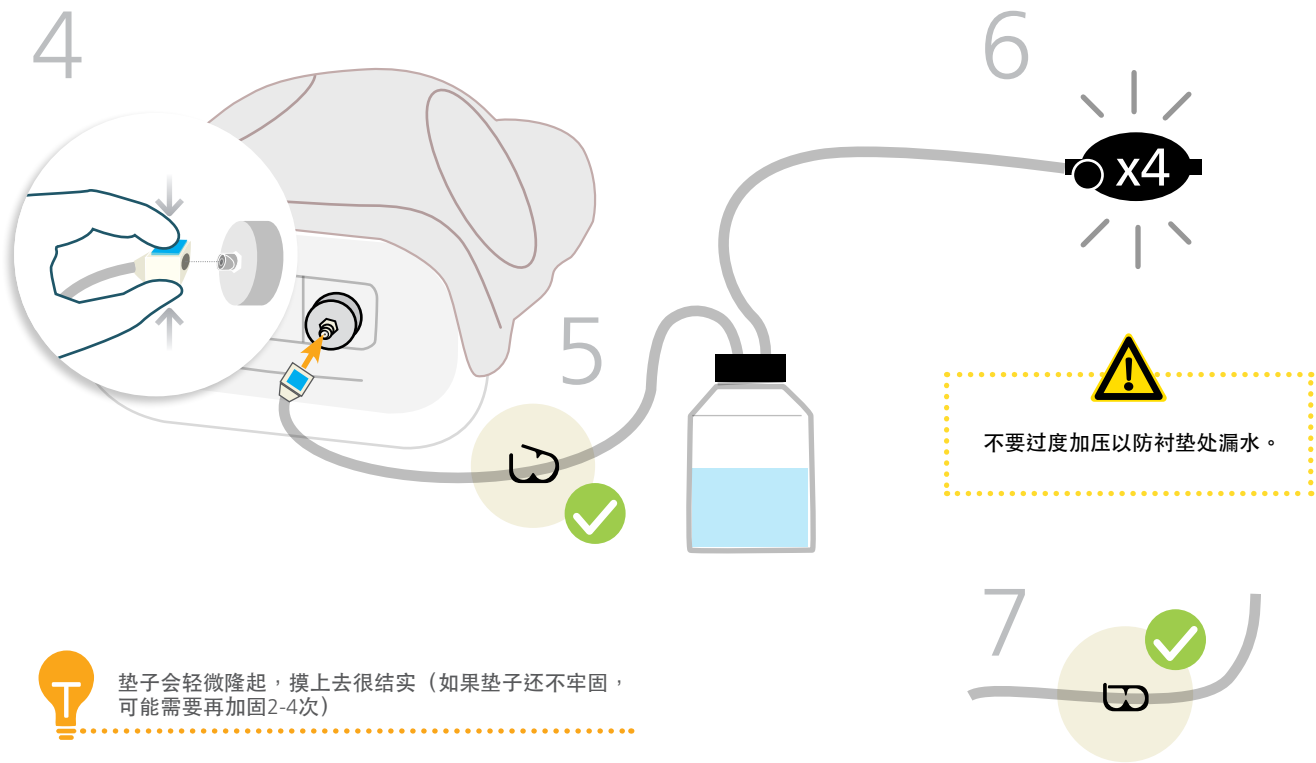


培训



诊断流程



治疗流程

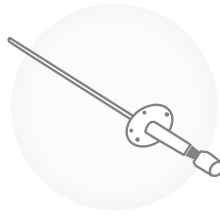


超声引导下流程





请看看我们的腹部穿刺视频

请访问该网站
limbsandthings.com
 或优酷频道
https://list.youku.com/albumlist/show/id_52483167

保养与维护

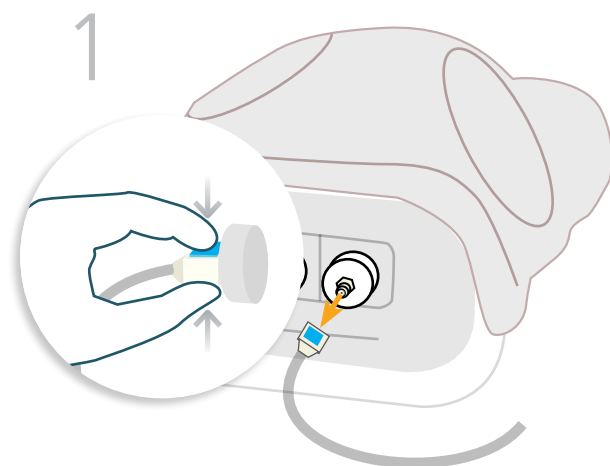

您可能需要稍微将模型倾斜，以排空剩余的水

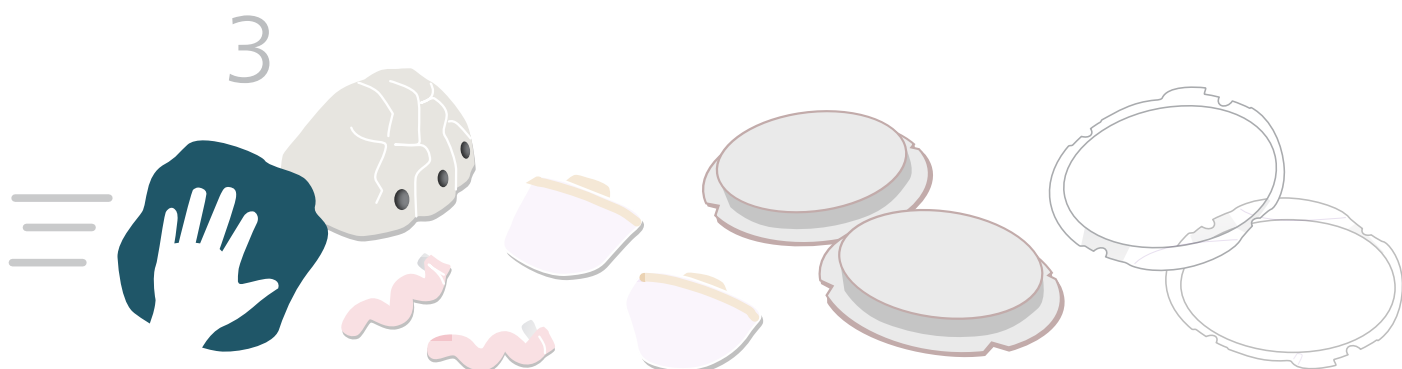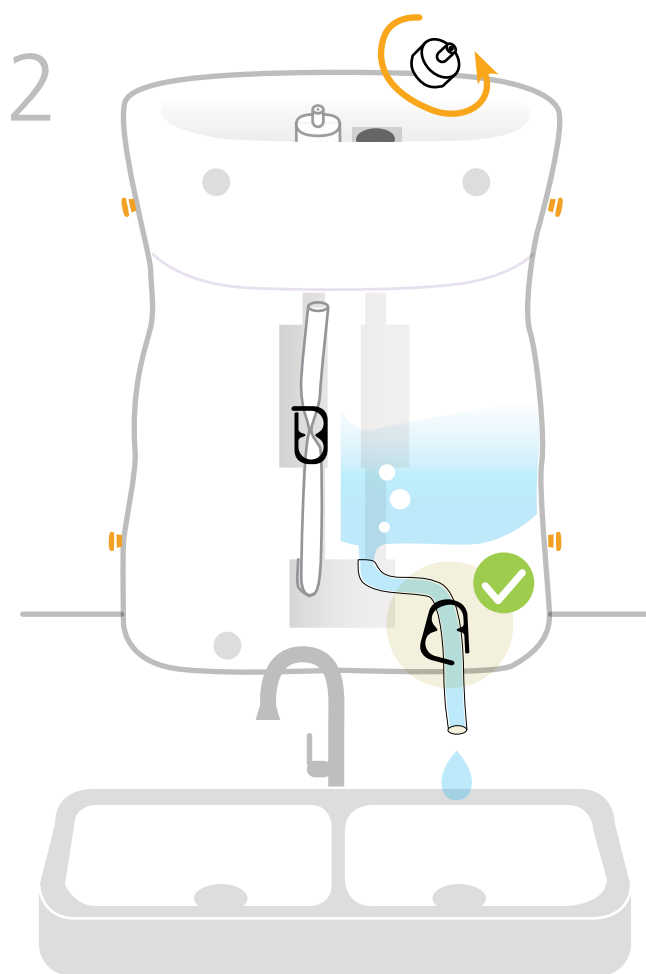

您可能还对以下产品有兴趣

胸腔引流针刺 减压模型

60230 61230



腹部检查模型

60000 60054



导尿系列

60850 60870

60851 60869

60852 60873

60853 60871

60854 60872



零件号：365-019

第1期，2020年8月
© 2020 Limbs & Things