




用户指南

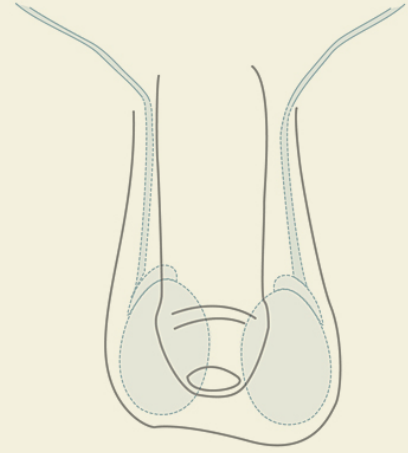

临床用男性 骨盆培训模型 (CMPT) MK 2

标准版



该产品有两种肤色可供选择，浅色和深色

60950

60964

如果您想了解更多关于技能培训产品请访

limbsandthings.com

Sussex Street, St Philips, Bristol, BS2 0RA, UK | sales@limbsandthings.com | +44 (0) 117 311 0500

目录索引

产品包含	3
安全与清洁说明	4
组装	5
• 组装临床用男性骨盆培训模型	5
• 安装包皮	6
培训	7
• 站立和仰卧	7
清洁和储存	7
• 使用后的清洁与储存	7

请观看我们的视频



请访问该网站
limbsandthings.com

或优酷频道
https://list.youku.com/albumlist/show/id_52483167

产品包含

临床用男性骨盆培训模型腹部插入物

60959

60973



下半身



底座



临床用男性骨盆培训模型模块1正常

60952

60966



临床用男性骨盆培训模型包皮

60961

60974



临床用男性骨盆培训模型耻骨

60960



手提箱



笔记

安全与清洁指南

在使用 临床用男性骨盆培训模型之前请仔细阅读安全说明

可以做



请遵循所有指南。
保留这些指南。
注意所有警告

只能使用水质润滑剂，比如本产品提供这种的。使用我们不推荐的润滑剂可能会减弱或损坏硅胶。



始终戴手套，取下所有首饰。
指甲和戒指等尖锐物会导致硅胶零件损坏

每次训练后请用潮湿柔软的布或海绵，温水和中性洗涤剂清洗此模型。



储存与运输



在运输和储存期间，始终确保产品正确包装和固定，以防止人身伤害或产品损坏。

不可以做



请勿将本产品安装在任何热源附近，不要将其暴露于明火或在裸露的火源附近使用。请勿在本产品附近或在该产品本身上使用易燃溶剂。

请勿使用任何非制造商出产的附件。



使用本产品时不要佩戴任何首饰。

如皮肤已撕裂请勿使用



请勿拆卸产品或尝试维修有故障的单元部件，请将产品退还给 Limbs & Things 进行评估和维修。



组装

组装临床用男性骨盆培训模型


1 拆卸/安装耻骨





临床用男性骨盆培
训模型模块-后视

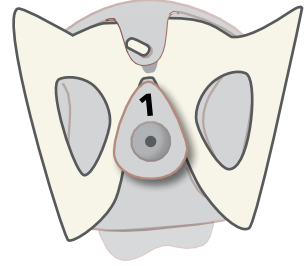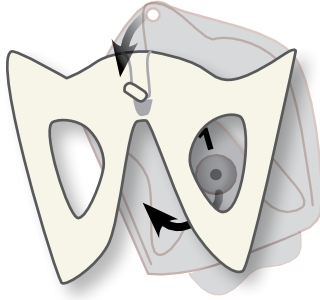




2 将临床用男性骨盆培训模型模块和耻骨安装在模型上

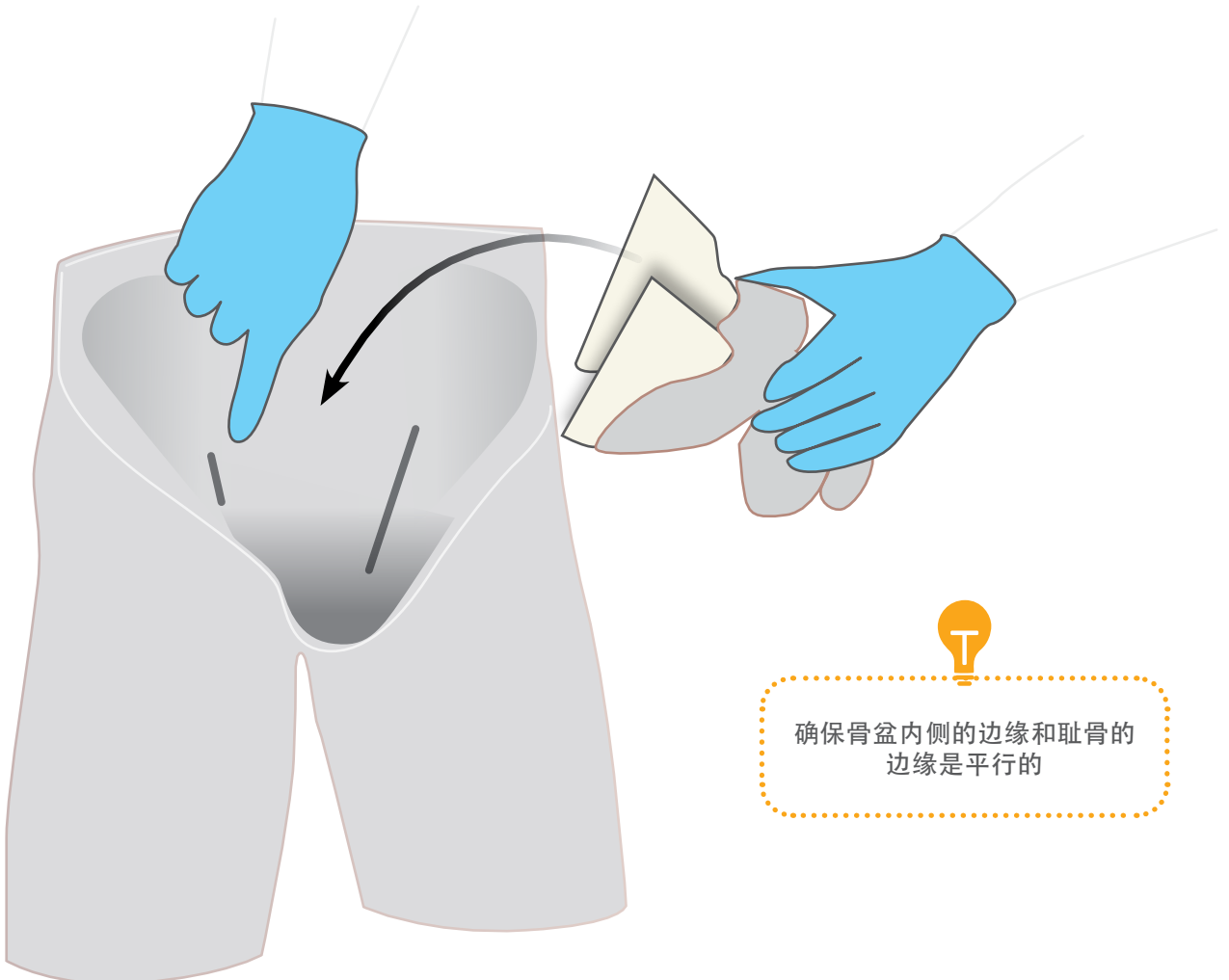

3 拆卸/安装 腹部插入物

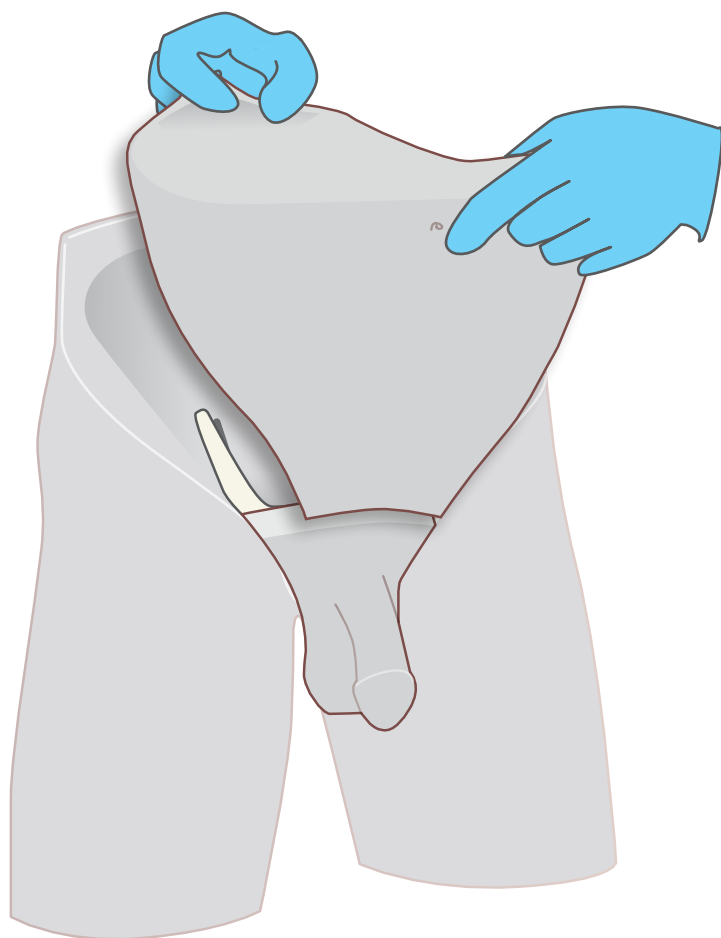
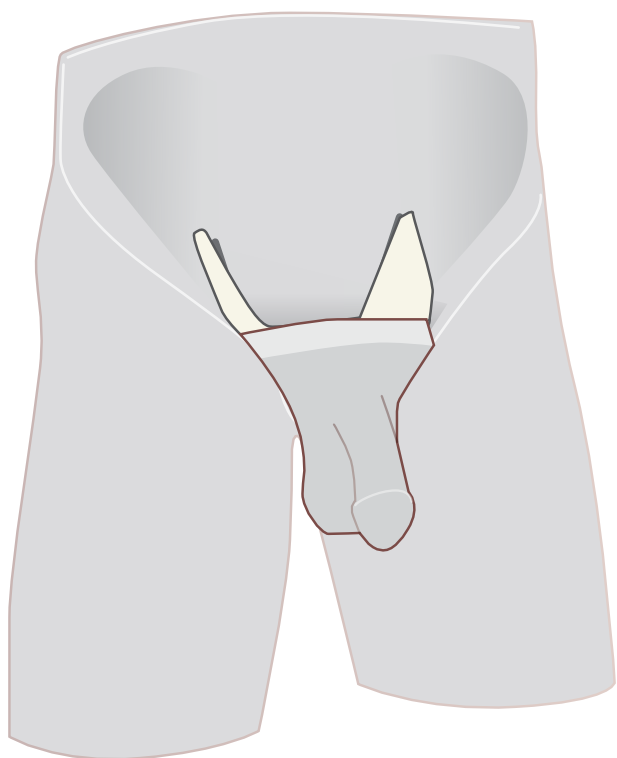


安装包皮

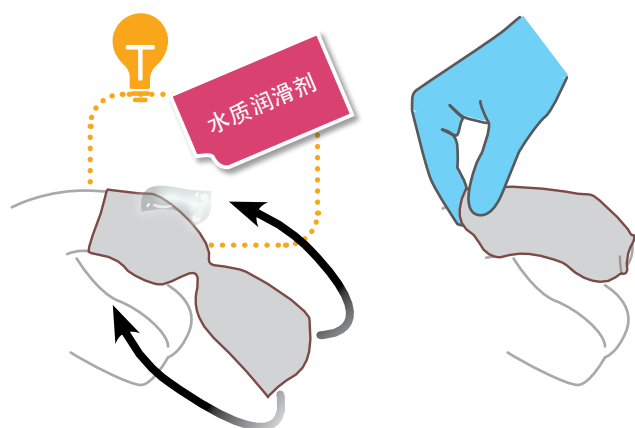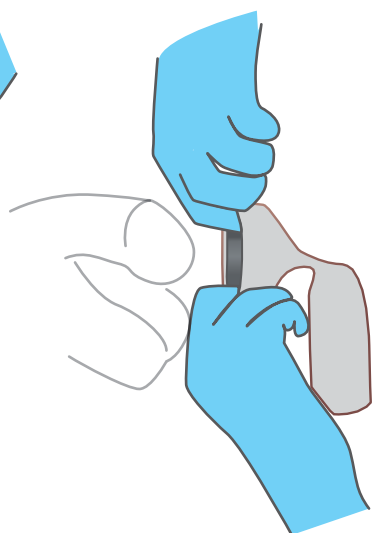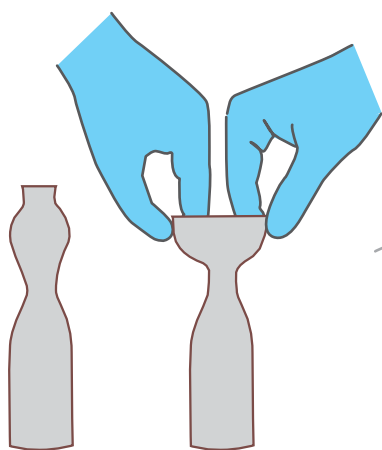


培训

可用于两种姿势：站立和仰卧

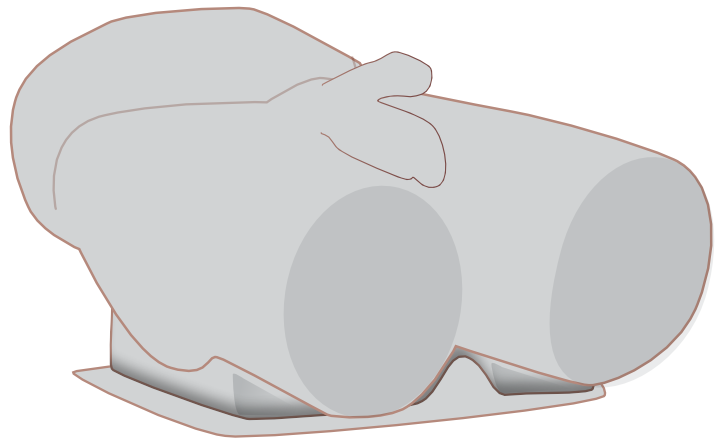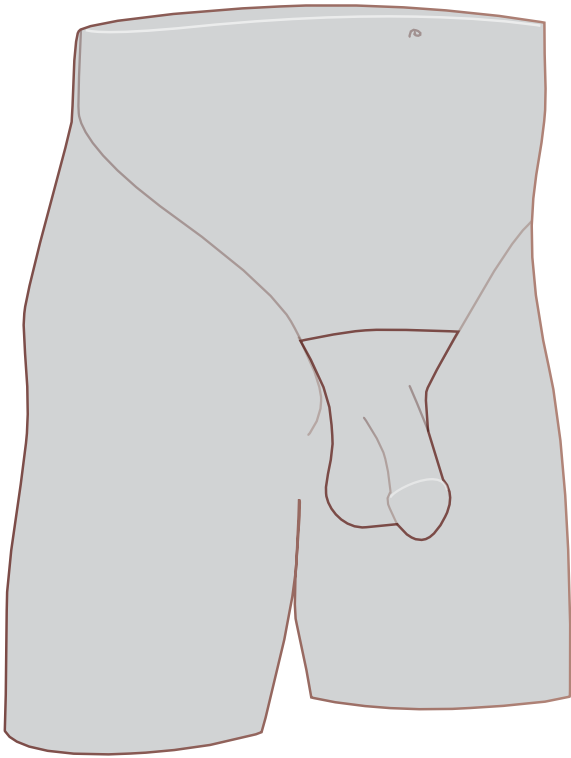

保养与维护

用柔软的湿布，
仅用温水和温和的清洁剂清洁表面的污垢

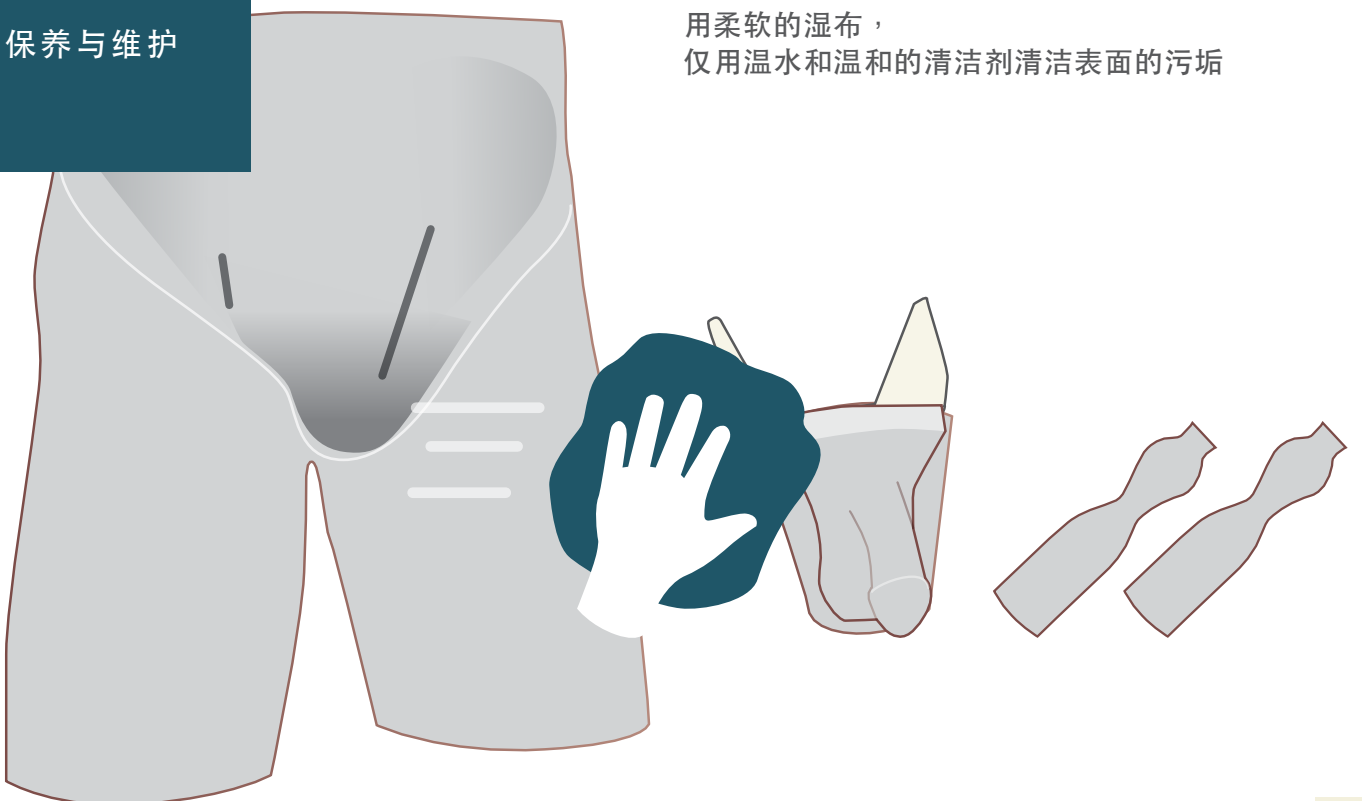


您可能还对
有兴趣...

临床用男性骨盆培训模型模块2

精索静脉曲张

60953

60967

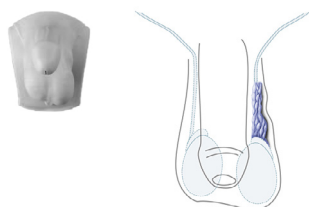


临床用男性骨盆培训模型模块3

睾丸肿瘤和阴茎癌

60954

60968

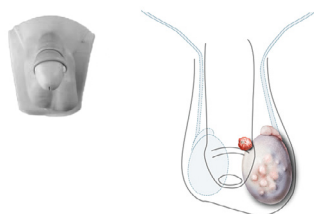


临床用男性骨盆培训模型模块4

附睾囊肿

60955

60969

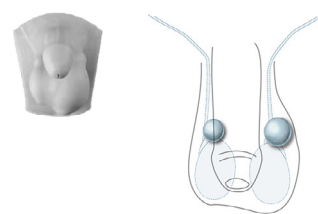


临床用男性骨盆培训模型模块5

阴囊积水

60956

60970

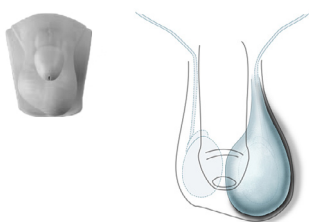


临床用男性骨盆培训模型模块6

睾丸炎/附睾睾丸炎

60957

60971

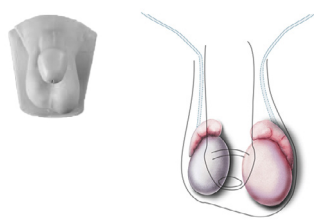


临床用男性骨盆培训模型模块7

腹股沟斜疝

60958

60972

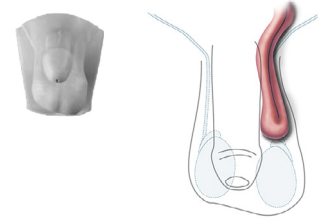

▶ 以上图片仅供参考，显示了CMPT模块中解剖结构的简化表示