



用户指南



男性直肠检查模型

高级版

该产品有两种肤色可供选择，浅色和深色

60171

60187

如果您想了解更多关于技能培训产品请访

limbsandthings.com

Sussex Street, St Philips, Bristol, BS2 0RA, UK | sales@limbsandthings.com | +44 (0) 117 311 0500

目录索引

产品包含	3
安全与清洁说明	4
组装	5
• 设置检查位置	5
• 安装/更换会阴	6
• 安装/更换前列腺	8
• 添加粪便模块	9
培训	10
• 直肠指检	10
• 评估肛门张力	10
清洁和储存	11
• 使用后的清洁与储存	11

请观看我们的视频



请访问该网站
limbsandthings.com

或优酷频道
https://list.youku.com/albumlist/show/id_52483167

产品包含

底座

60177

60191



外部病变状况说明包

60173

60188



左侧支架


60174



会阴-正常

60175


60189

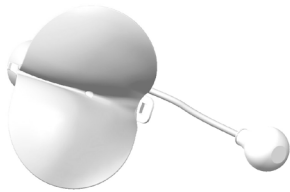

会阴-病理性

60176

60190

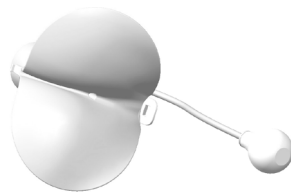

水质润滑剂

00293



60178

前列腺和粪便模块组

60179

前列腺-正常



60180

前列腺-良性
单侧肿大



60181

前列腺-良性
双侧肿大



60182

单侧前列腺癌



60183

双侧前列腺癌



60184

粪便模块



安全与清洁说明

在使用男性直肠检查模型训练器之前请仔细阅读安全说明

可以做




请遵循所有指南。
保留这些指南。
注意所有警告

只能使用水质润滑剂，比如本产品提供这种的。使用我们不推荐的润滑剂可能会减弱或损坏硅胶。



始终戴手套，取下所有首饰。
指甲和戒指等尖锐物会导致硅胶零件损坏

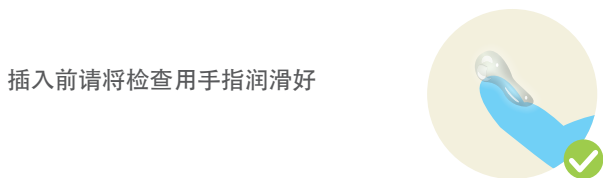

插入前请将检查用手指润滑好



每次训练后请用潮湿柔软的布或海绵，温水和中性洗涤剂清洗此模型。清除多余的润滑剂，并去除任何灌肠剂、栓剂或霜膏。因为这些会损坏产品。

储存与运输




在运输和储存期间，始终确保产品正确包装和固定，以防止人身伤害或产品损坏。请注意不要让会阴接触尖锐或重物，以免刺穿

不可以做




请勿将本产品安装在任何热源附近，不要将其暴露于明火或在裸露的火源附近使用。请勿在本产品附近或在该产品本身上使用易燃溶剂。

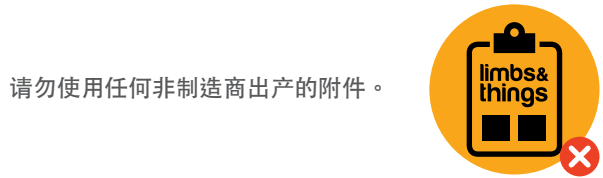

请勿使用任何非制造商出产的附件。




使用本产品时不要佩戴任何首饰。

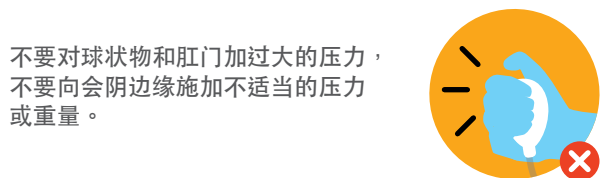

不要对球状物和肛门加过大的压力，不要向会阴边缘施加不适当的压力或重量。



如皮肤已撕裂请勿使用

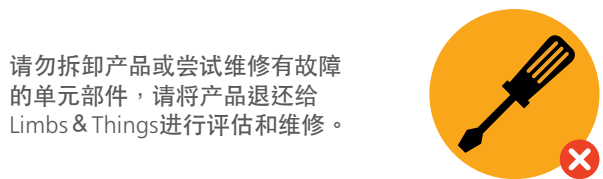

请勿拆卸产品或尝试维修有故障的单元部件，请将产品退还给 Limbs & Things 进行评估和维修。




请勿让儿童使用此产品

组装

设置考试位置


左侧卧位-使用提供的左侧支架 (60174)

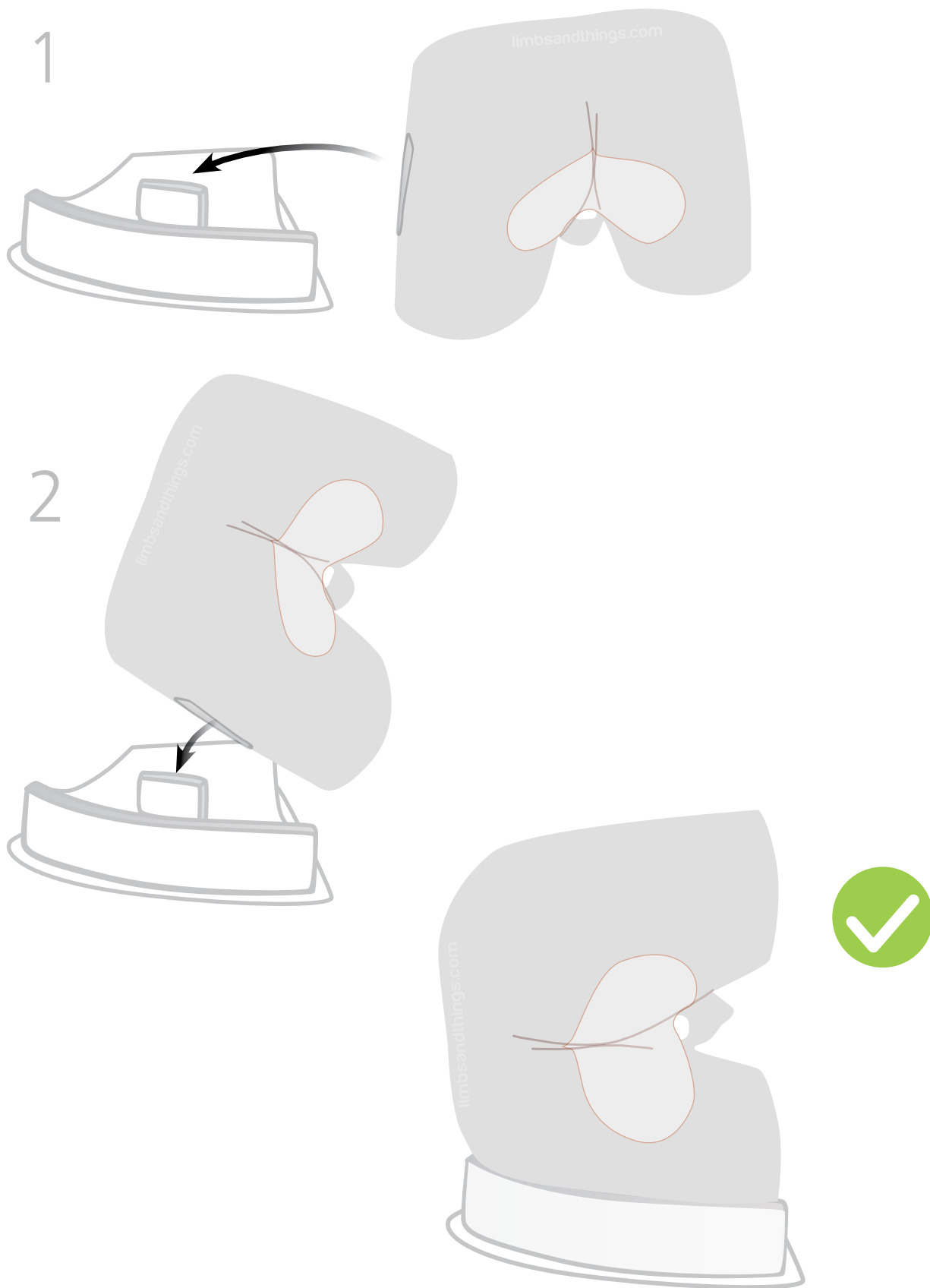

组装

安装/更换会阴

移除

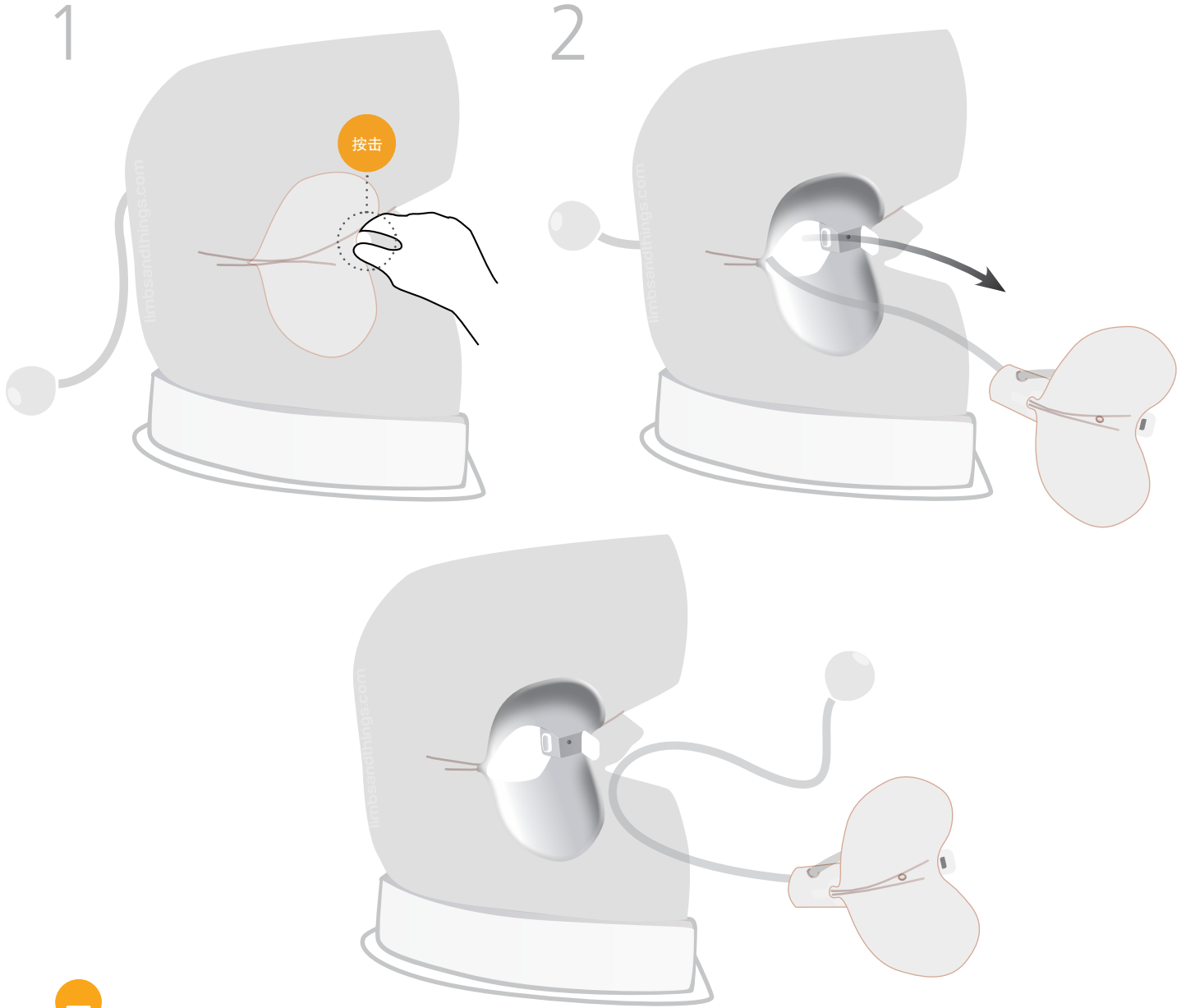

病理会阴可以通过内壁的癌和息肉来鉴别

正常




60175

60189

病理学

60176


60190

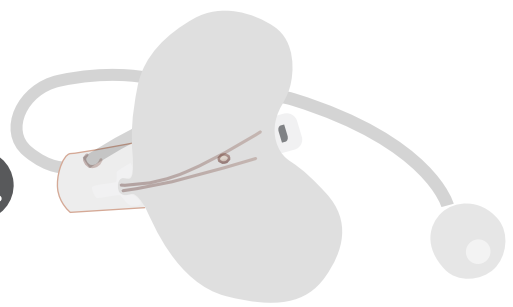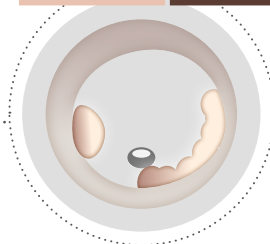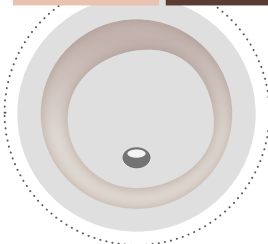


组装

附加


1

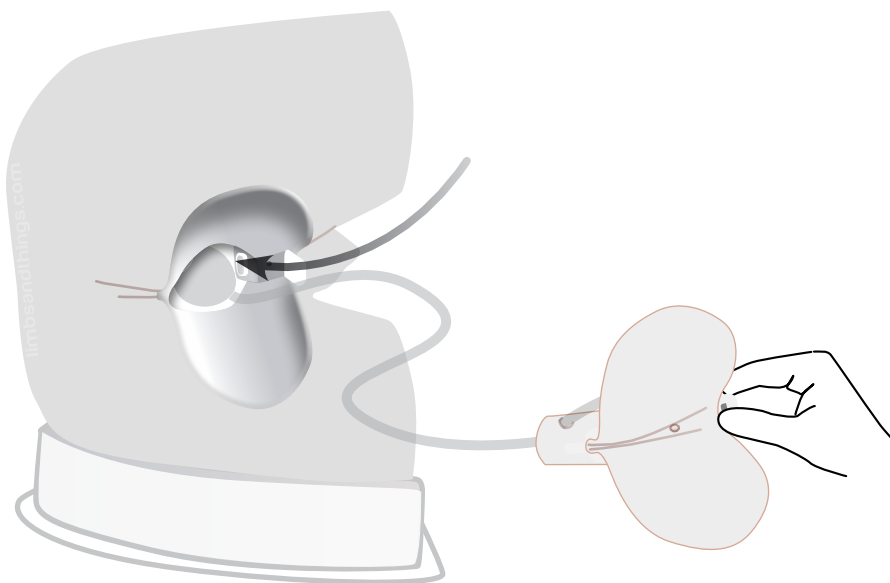

2



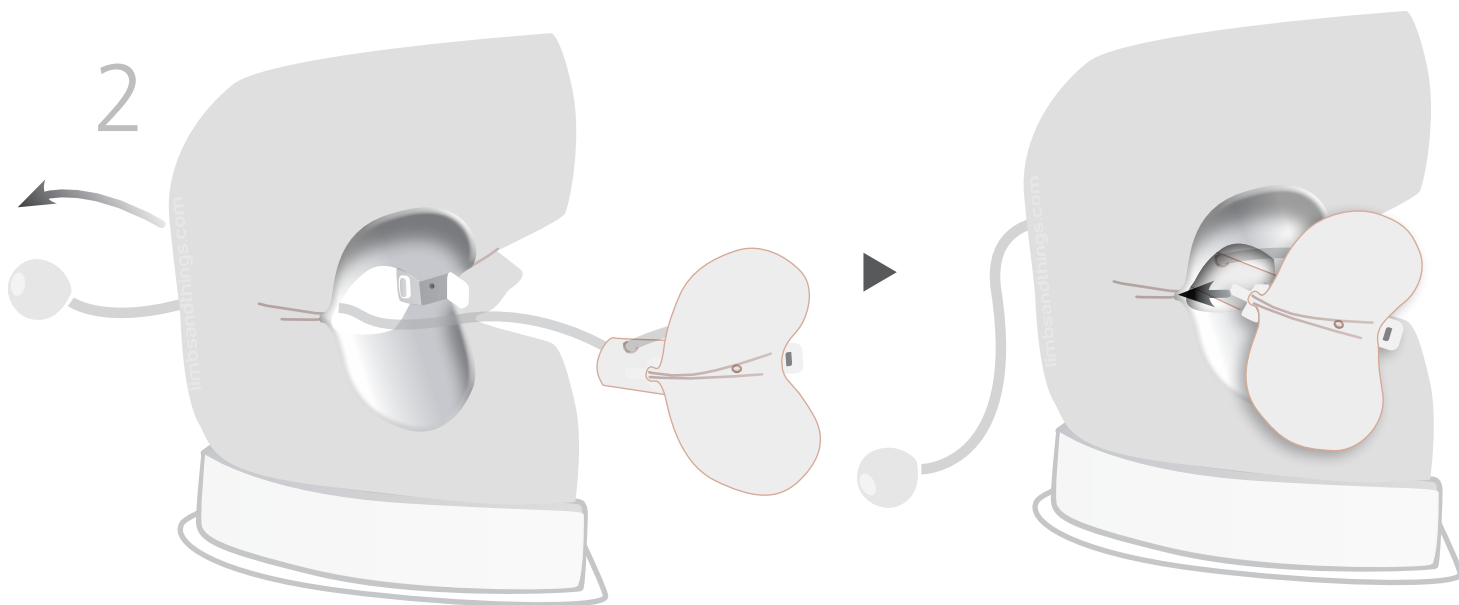


3

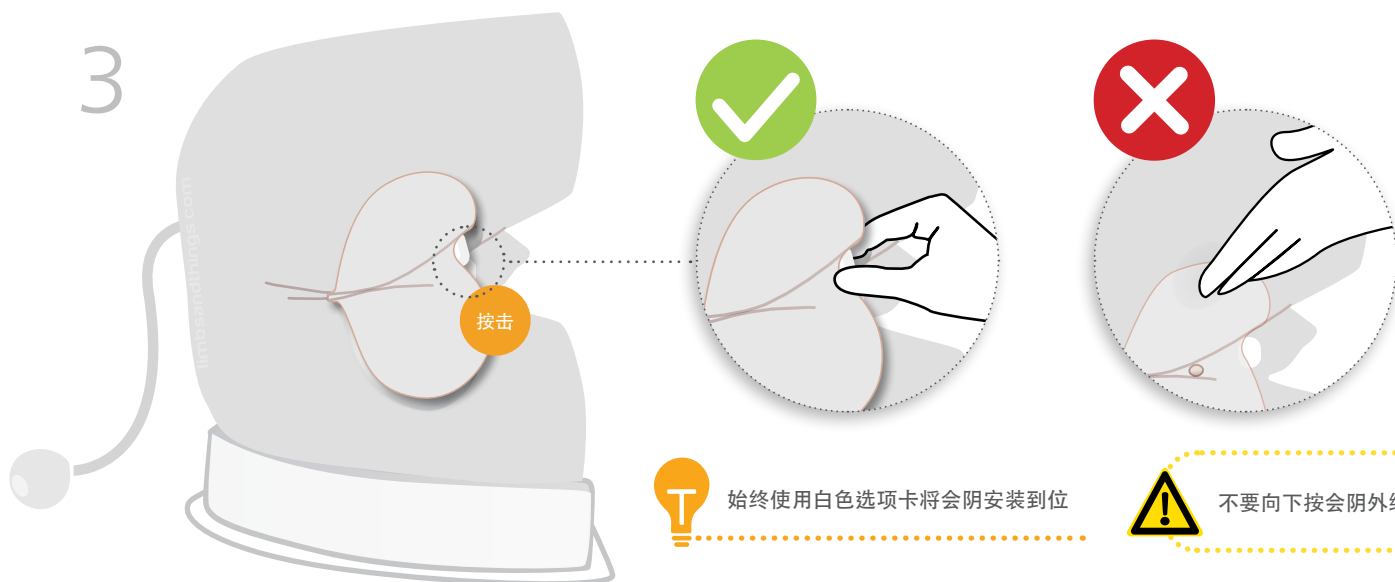


组装

安装/更换前列腺

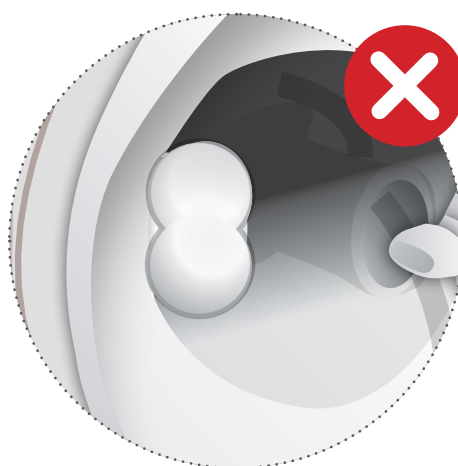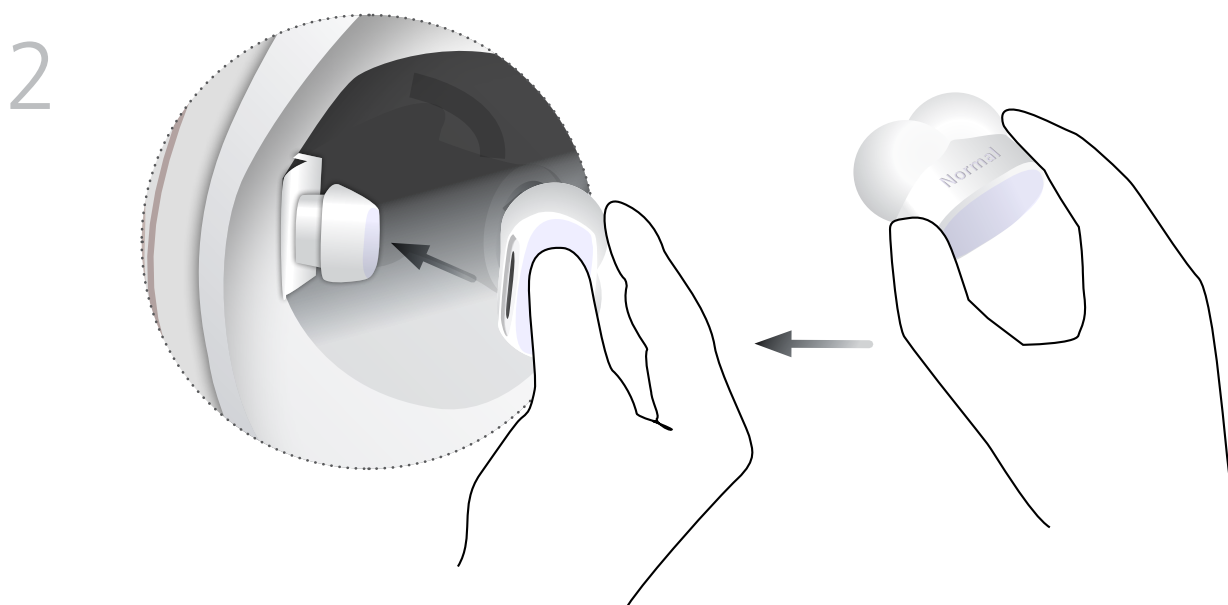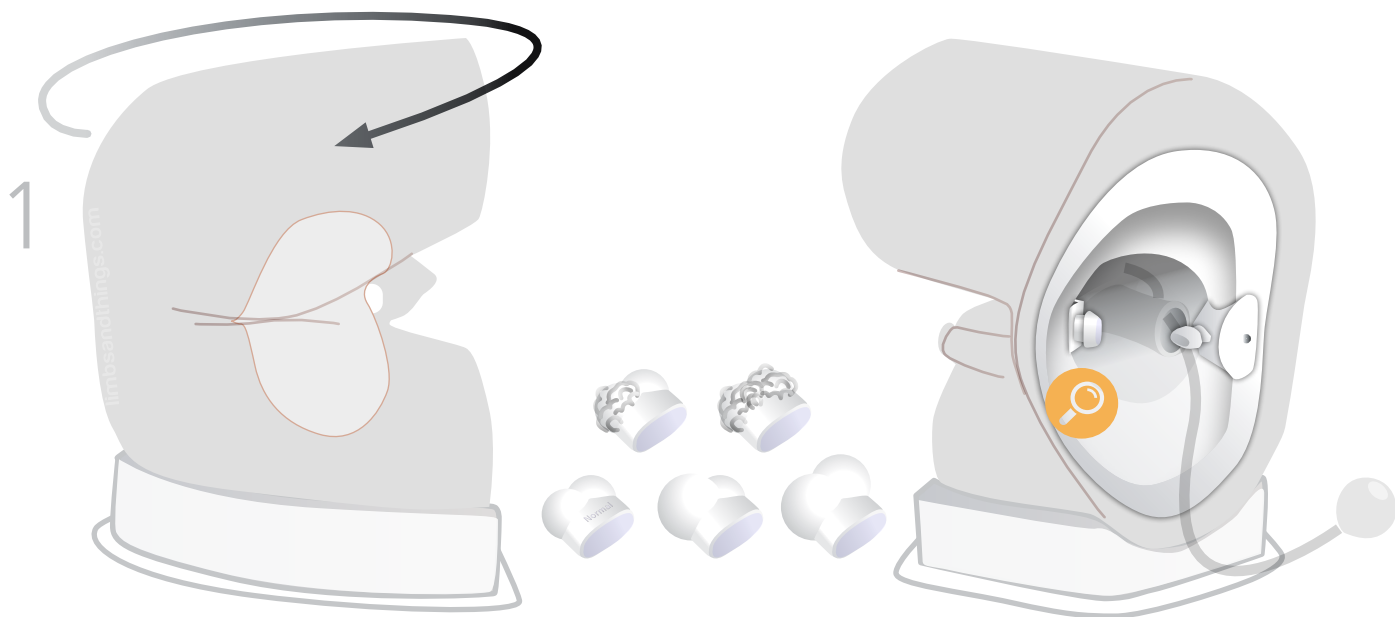


组装



添加粪便模块

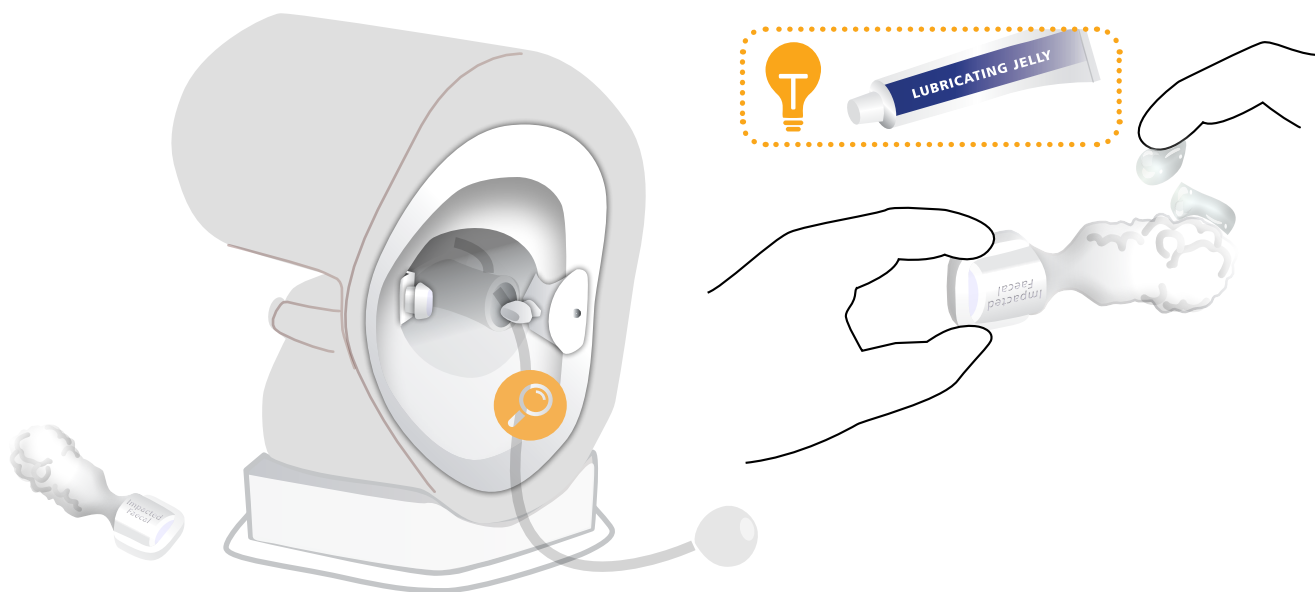

1

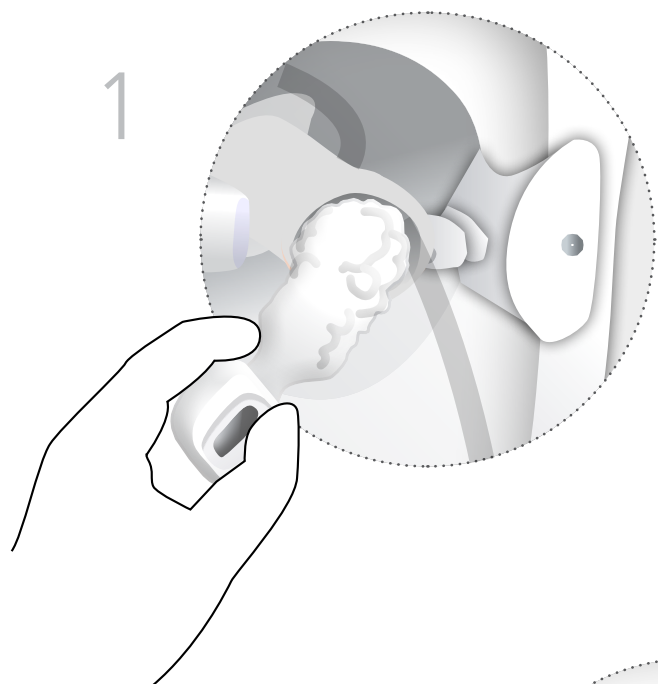


2

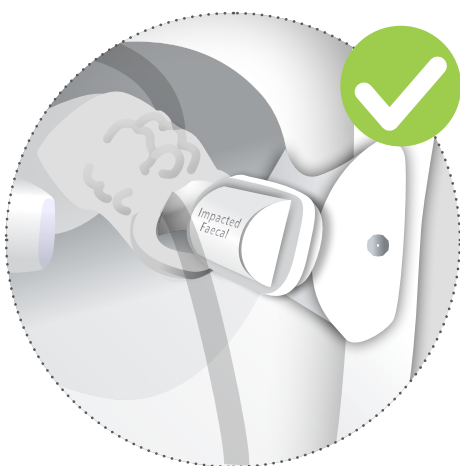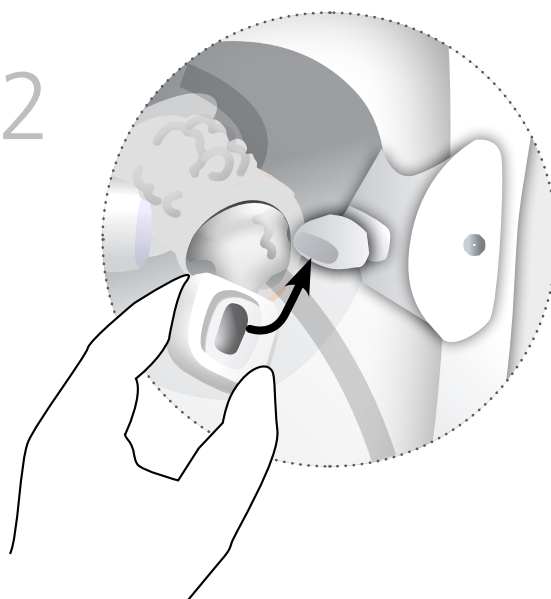

培训

直肠指检

- 始终戴手套，取下所有首饰。指甲和戒指等尖锐物会导致硅胶零件损坏
- 插入直肠前请将检查用手指润滑好

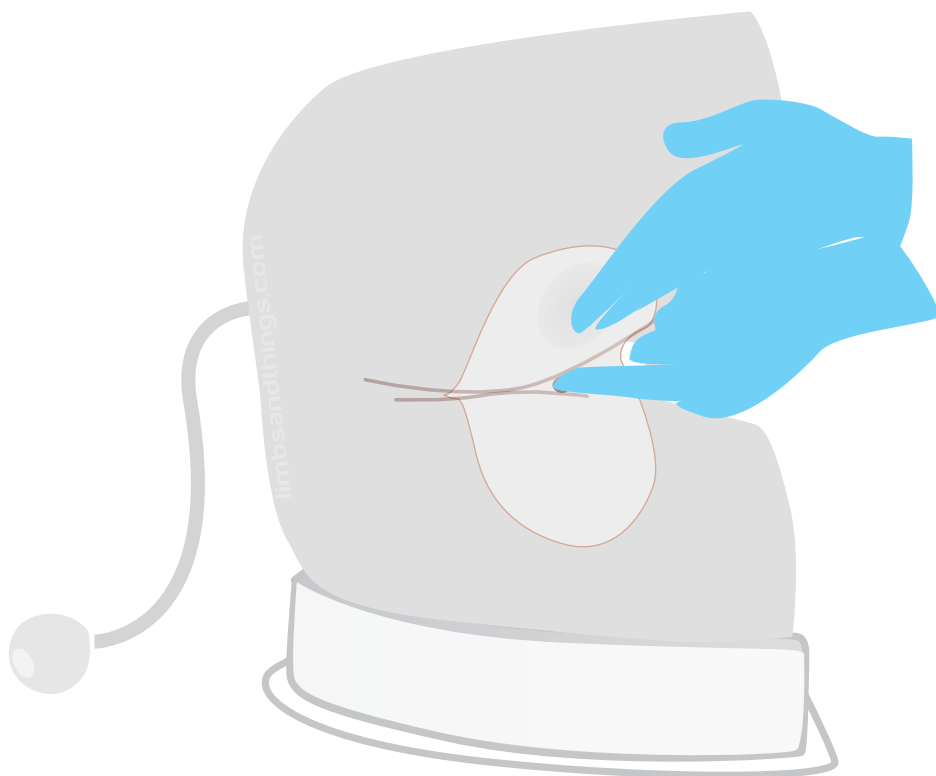


评估肛门张力

进行检查的人员将感受到他们在手指上的握力




请不要过于用力。

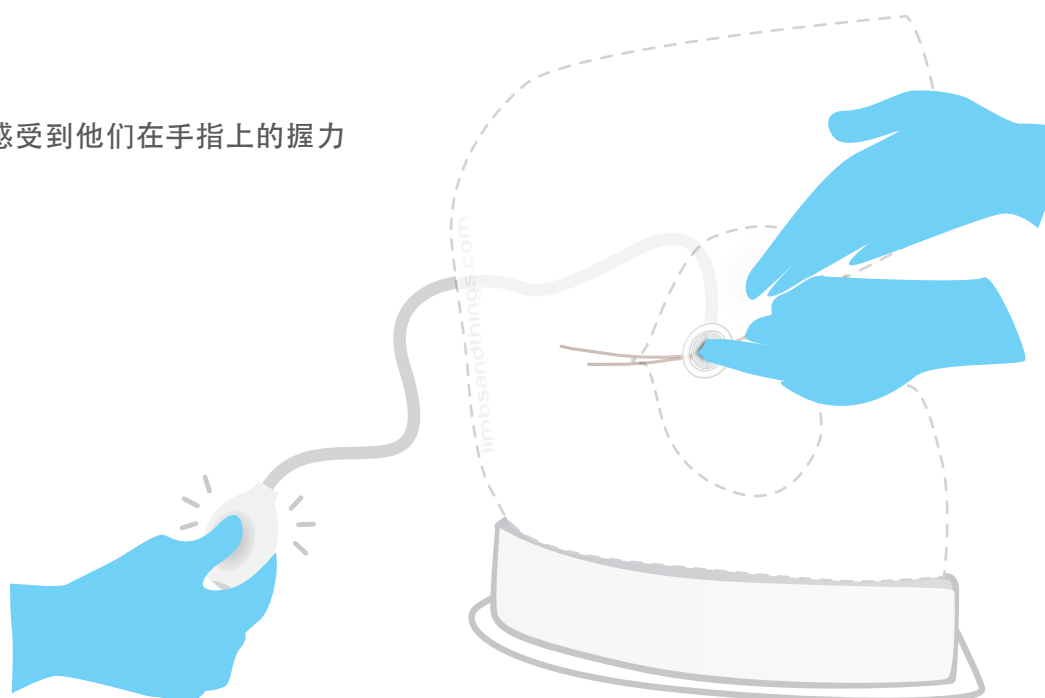

培训

评估肛门张力

挤压球状物以模拟括约肌收缩和评估肛门张力

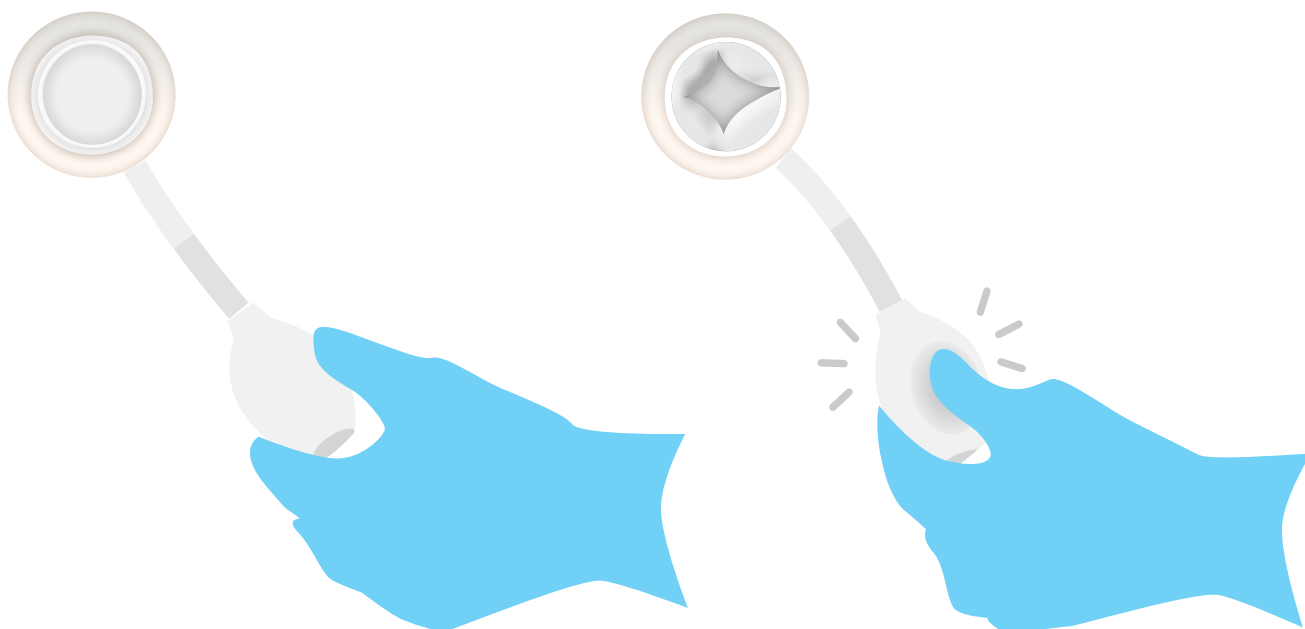

保养与维护


- 用软布擦去多余的润滑剂
- 用柔软的湿布，仅用温水和中性洗涤剂清洁表面的污垢



您可能还对
有兴趣...

60172 站姿支架

半站立姿势检查

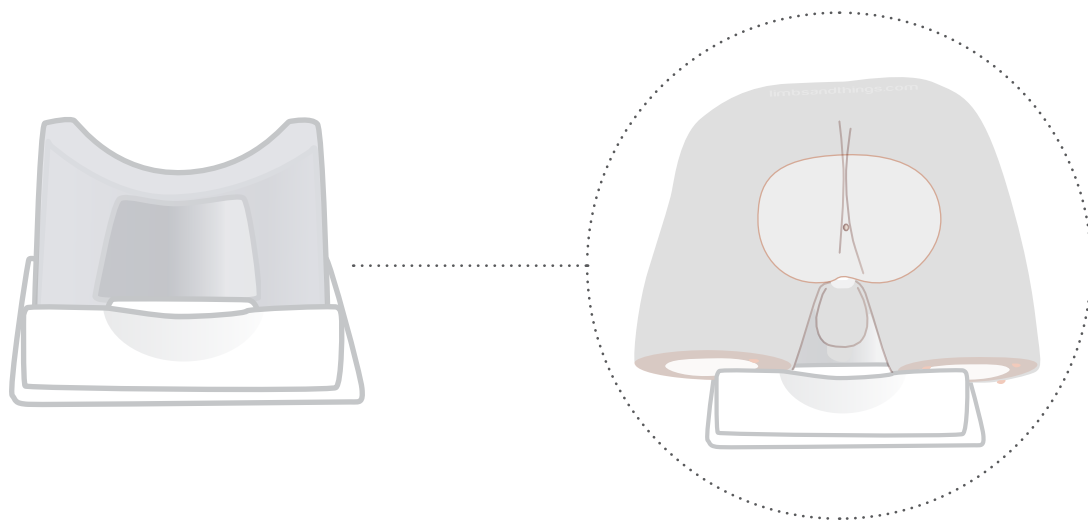

40209 中型手提箱

