



用户指南



PROMPT FLEX 分娩培训模型

高级版



该产品有两种肤色可供选择，浅色和深色

80106

80206

如果您想了解更多关于技能培训产品请访问

limbsandthings.com

Sussex Street, St Philips, Bristol, BS2 0RA, UK | sales@limbsandthings.com | +44 (0) 117 311 0500

目录索引

产品包含	3
测试认证	4
安全与清洁说明	6
PROMPT FLEX分娩培训模型的APP	7
• 下载PROMPT FLEX分娩培训模型的APP	7
• 给你的无线拉力监控婴儿充电	8
• 连接你的无线监控婴儿与软件	9
• 使用PROMPT FLEX分娩培训模型的软件	11
组装PROMPT FLEX分娩培训模型	13
• 添加/移除腹部	13
• 安装/移除子宫颈	14
• 设置不同的训练场景演习	15
培训	16
• 正常分娩	16
• 臀位产	17
• 肩难产	18
清洁和储存	19
• 添加/移除会阴	19
• 更换/清洁肌肉注射垫	19
• 收紧/松开大腿	19

请观看我们的视频

请访问该网站
limbsandthings.com

或优酷频道

https://list.youku.com/albumlist/show/id_52483167




产品包含

分娩母体

80120


80220

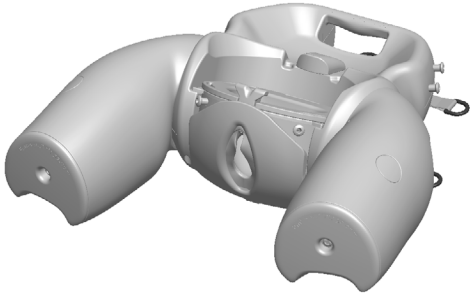

无线拉力监控婴儿


80122FM

80222FM

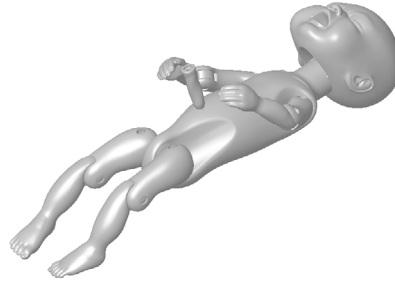

胎盘

80123

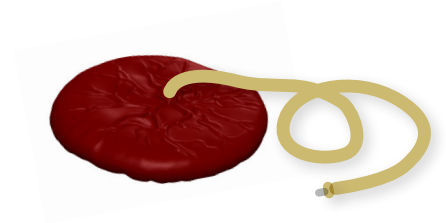

腹部

80124


80224



会阴和产道


80125

80225

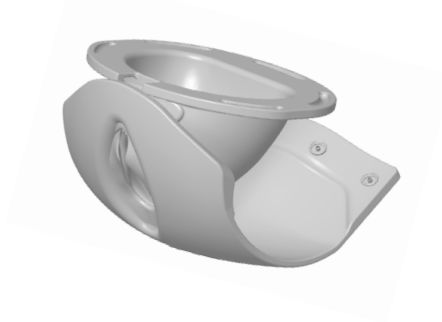

子宫颈

80126

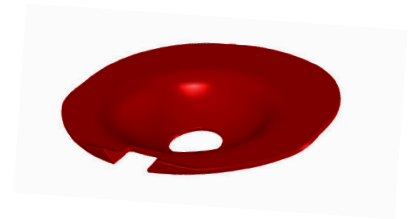

耻骨架


80107

80207



固定带

80130

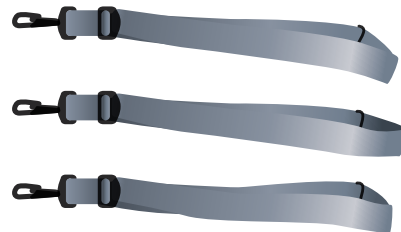

水质润滑剂

10193



轮式手提箱

01000





EC DECLARATION OF CONFORMITY

In accordance with ISO IEC 17050-1 : 2010

We

Limbs and Things Ltd

of

Sussex Street, St. Philips, Bristol, BS2 0RA

Declare under our sole responsibility that the product described below:

Brand and Model Name	Limbs and Things Prompt Flex Birthing simulator, Part number: 80122, 80106, 80206, 80108, 80208, 80222, 80197, 80297, 80198, 80298, 80199 & 80299.
-----------------------------	---

Has been tested and is in conformity with the following standards:

<u>SUBJECT</u>	<u>STANDARD</u>
Electrical Safety	IEC 61010-1 Ed.3.0 and EN61010-1: 2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use.
Electromagnetic Compatibility	EN61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Emissions: EN55016-2-3:2006 EN61000-3-2:2006 +A1+A2 EN61000-3-3:2013 EN55011:2009+A1 (CISPR 11) Immunity: EN61000-4-2: 2009 EN61000-4-3: :2006 +A1 +A2 EN61000-4-4: 2004 EN61000-4-5: 2006 EN61000-4-6: 2009 EN61000-4-11:2004
Radio performance	EN 300 328 V1.8.1:2012-06
RoHS 2	2011/65/EU

Thereby meeting the essential requirements of directive (RED) (2014/53/EU)

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the relevant sections of the above referenced Standards and meets all essential requirements of the RTTE Directive.

Signed Nicholas Hull
Position Managing Director
Location Bristol, England

Signature

Date 11 May 2020



DECLARATION OF CONFORMITY

We

Limbs and Things Ltd

of

Sussex Street, St. Philips, Bristol, BS2 0RA

Declare under our sole responsibility that the product described below:

Brand and Model Name	Limbs and Things Prompt Flex Birthing simulator, Part number: 80122, 80106, 80206, 80108, 80208, 80222, 80197, 80297, 80198, 80298, 80199 & 80299.
-----------------------------	---

Has been tested and is in conformity with the following standards:

Technical regulations	47CFR: 2008 Part 15, Sub Part C Intentional Radiators; Conducted (clause 15.207) and Radiated (clause 15.209) Emission Limits
Test laboratory	York EMC services 46 Waverley Road Beeches Industrial Estate Yate Bristol BS37 5QT
Test report number	B1726TR1
Test report date	9 th June 2015

This product contains a Panasonic radio module PAN1026 which has been tested in accordance with the necessary standards. This device holds FCC ID: T7VPAN10

Signed Nicholas Hull
Position Managing Director
Location Bristol, England

Signature 

Date 11 May 2020

安全与清洁指南

在使用PROMPT FLEX分娩培训模型标准版之前请仔细阅读安全说明

可以做



请遵循所有指南。
保留这些指南。
注意所有警告

只能使用水质润滑剂和模拟血，
比如本产品提供的这种。
使用我们不推荐的液体可能会减
弱或损坏硅胶



始终戴手套，取下所有首饰。
指甲和戒指等尖锐物会导致硅胶零件损坏

每次分娩练习前请务必将婴儿和产
道润滑好。



每次训练后请用潮湿柔软的布或海绵，
温水和中性洗涤剂清洗此模型。
清除母婴表面
所有多余的润滑剂。

储存与运输



在运输和储存期间，
始终确保产品正确包装和固定，
以防止人身伤害或产品损坏。

不可以做



请勿将本产品安装在任何热源附近，
不要将其暴露于明火或在裸露的火源
附近使用。
请勿在本产品附近或在该产品本身上
使用易燃溶剂。

请勿使用任何非制造商出产的附件。



使用本产品时不要佩戴任何首饰。

请勿拆卸产品或尝试维修有故障
的单元部件，请将产品退还给
Limbs & Things进行评估和维修。



此产品包含电子产品不要用湿手处理使
用它，或将它浸入水或其它液体中。



使用过程中如果婴儿或胎盘润滑剂涂抹的不足，
可能会损坏产道或宫颈。

保修

- 我们建议您当收到产品时验收检查一下产品 并以适当的方式储存。
- 我们建议您给婴儿的电池充满电。如果婴儿不太可能长期使用，在储存它之前，请将其充满电，以保持电池的健康。
- 我们也建议您收到此产品以后尽快为婴儿注册，这样我们可以获取负责人此产品人员的详细联系方式，以便我们通知您重要产品更新信息。
- Limbs & Things 对此产品质量保修期为12个月从发票开出之日起。12 月内我们免费更换或修理。


本保修不包括因以下原因造成的损坏

1. 误用，包括但不限于
 - (a) 未按此产品所设计的用途使用此产品或未按Limbs & Things 的产品用户指南指示使用此产品。
 - (b) 在使用国以某种方式安装或使用此产品不符合现行的技术或安全标准
 - (c) 软件安装不当或不正确
2. 客户自行维修
3. 使用任何不与此产品兼容的系统造成的损坏
4. 使用未经Limbs & Things 核准的配件造成的损坏
5. 刮伤或损坏所有塑料表面和其他由于客户正常使用而导致的外部暴露零件。

PROMPT FLEX 分娩培训模型 APP


下载PROMPT FLEX分娩培训模型APP

在这里下载
limbsandthings.com

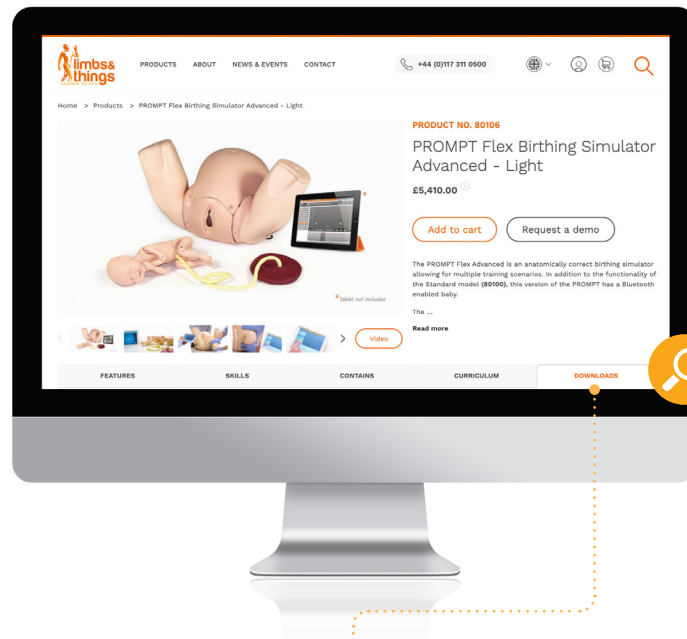


DOWNLOADS


选择适用于您的设备的下载

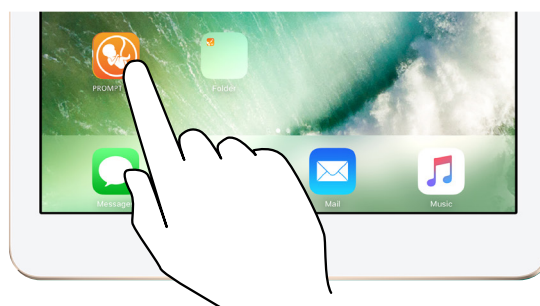


1 接通

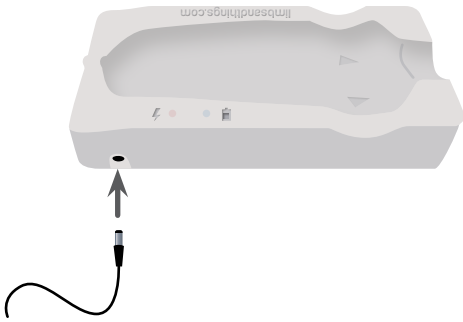


2 充电底座的电源

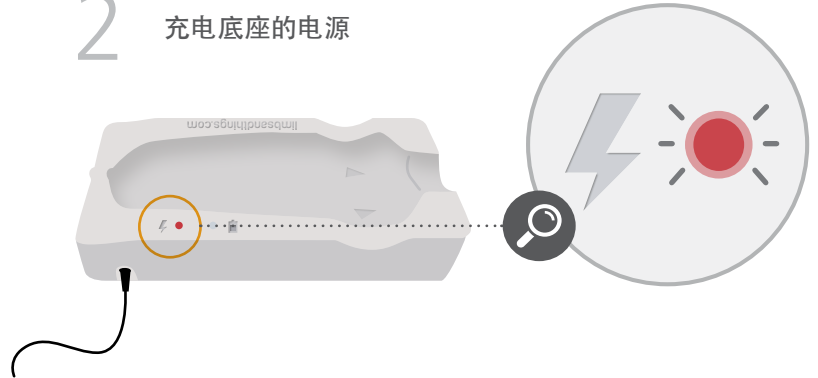

3 充电

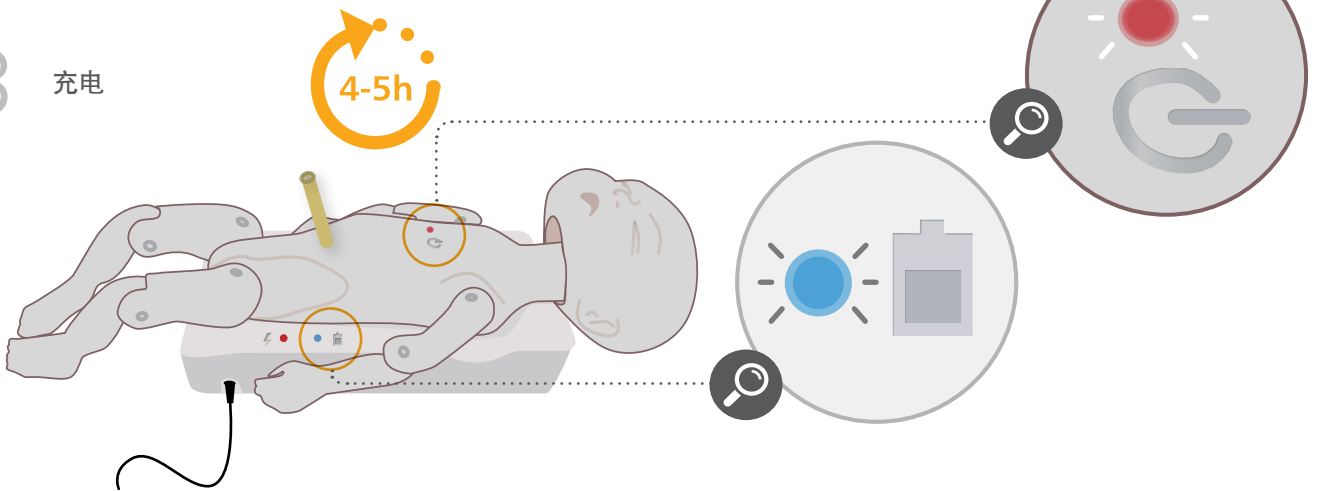

4 充满电

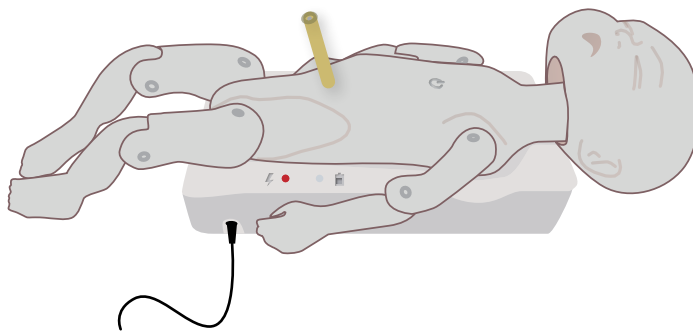


无线拉力监控婴儿技术参数

运行时间	10 小时 (约)
充电时间 (从无电状态)	4-5 小时 (大约)
待机时间	40 天
自动关机	2 分钟
最大载荷 (力)	500 牛顿
充电器托架电源 (底座) 额定值	12V DC, 500mA


PROMPT FLEX
分娩培训模型
APP

将婴儿和软件连接

1 将婴儿的开关打开

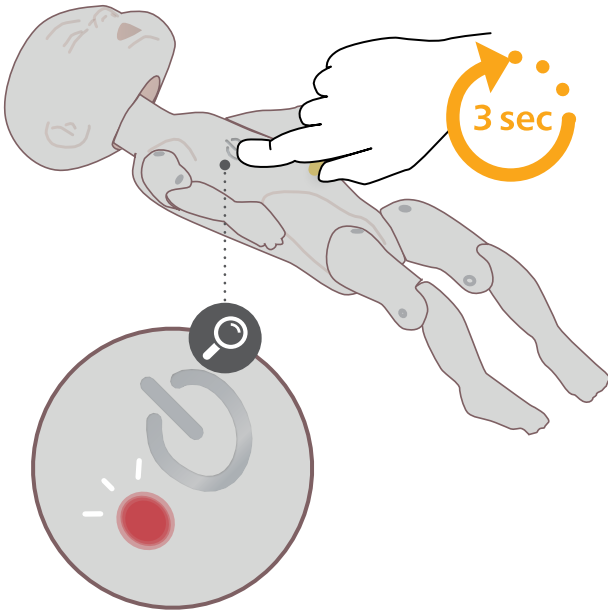


2 在设备上启用蓝牙

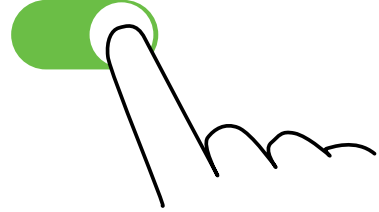


3 加 PROMPTFLEX_XXXXXX 到你的器械上



4 打开PROMPT FLEX分娩培训模型APP

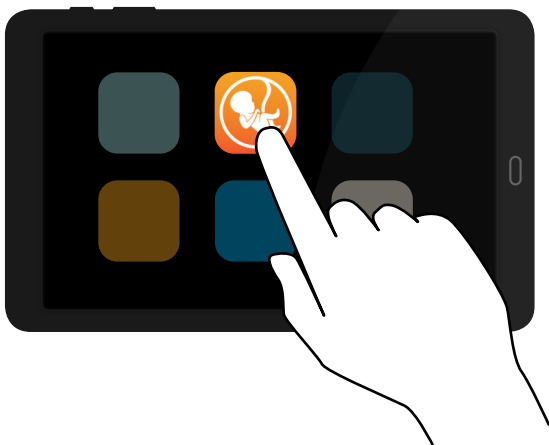

5 按 Connect your baby

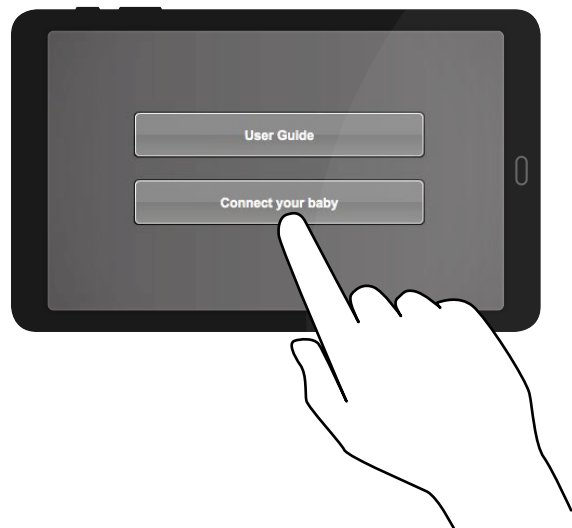

PROMPT FLEX
分娩培训模型
APP

将婴儿和软件连接

6 点击 Connect





您的婴儿可通过6个数字的序列号识别。

7 按 Rescan 如果您的婴儿编号没有出现



您可能需要多次选择 'Rescan' 才可以成功的连接上婴儿

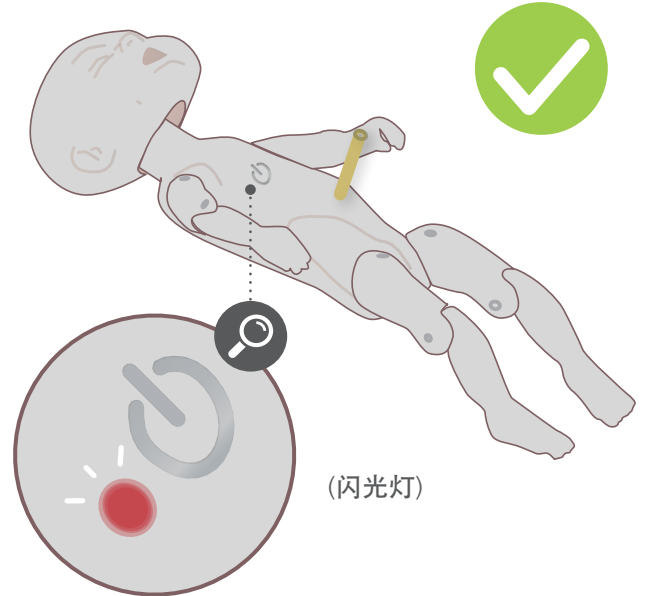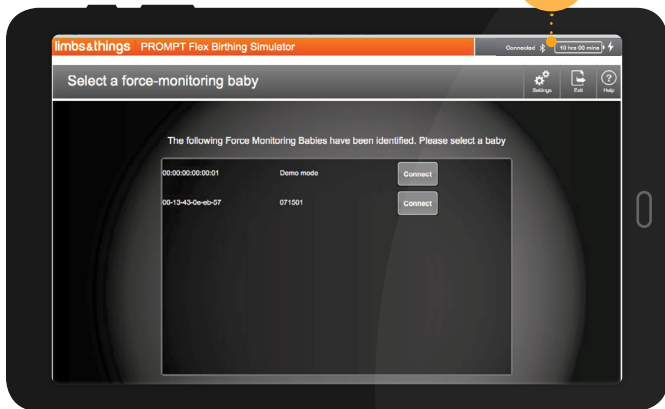

Register your baby

Please complete the fields then select the 'tagged' button at the bottom of this form. This information will be stored on the baby device and sent to Limbs & Things. It is a one-time operation. (A detector mandatory)

Your name: _____

Responsible: _____

Institution: _____

Department or Group: _____

Address line 1: _____

Address line 2: _____

Address line 3: _____

City: _____

State or county: _____

Country: Please select your country

Zip or Postal Code: _____

当您第一次把你的婴儿和软件连接起来的时候，Register your baby 屏幕将启动。





您注册婴儿时需要连接互联网连接。

您在这里提供的电子邮件地址将用于通知您任何未来产品升级注册信息，不可更改。

PROMPT FLEX 分娩培训模型 APP

使用PROMPT FLEX分娩培训模型软件

演练/仪表 模式

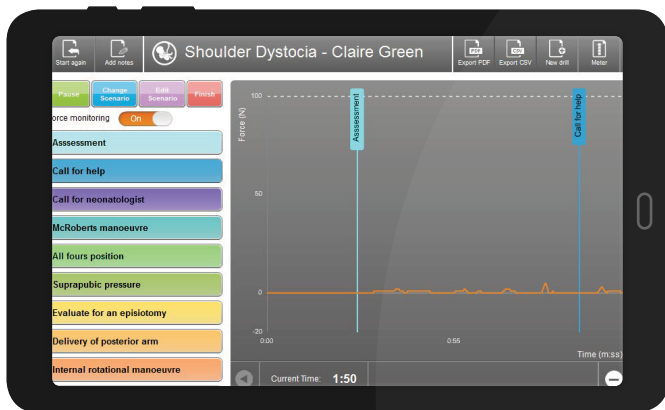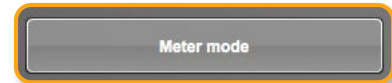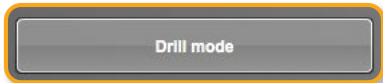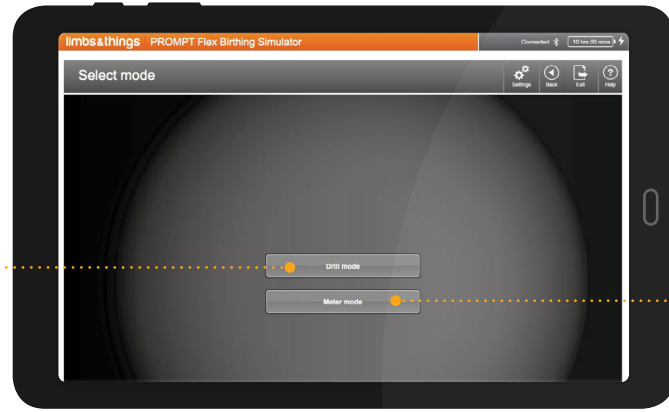

• 预编的分娩培训场景


1. 正常分娩
2. 肩难产
3. 阴道臀位产
4. 产钳
5. 胎吸助产
6. 第三产程

• 可以记录时间、力量和干预措施

• 记录生产过程中婴儿头部所受拉力的大小，单位为牛顿。

• 给出读数并在条形图上绘图


• 在场景培训以外允许您监视婴儿头部所受拉力

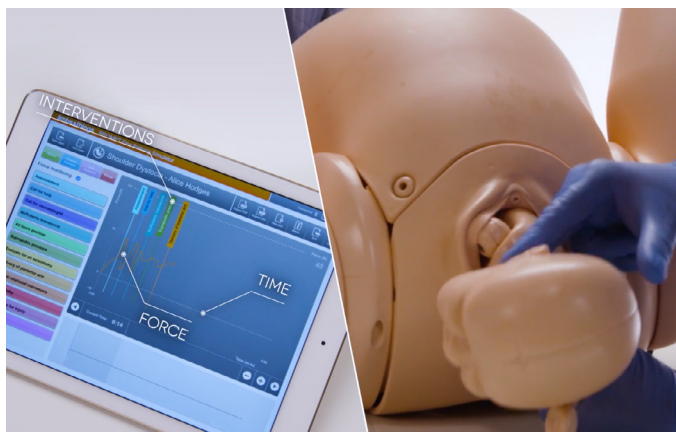

PROMPT FLEX 分娩培训模型 APP


使用PROMPT FLEX分娩培训模型软件

在不连接婴儿的情况下探索软件

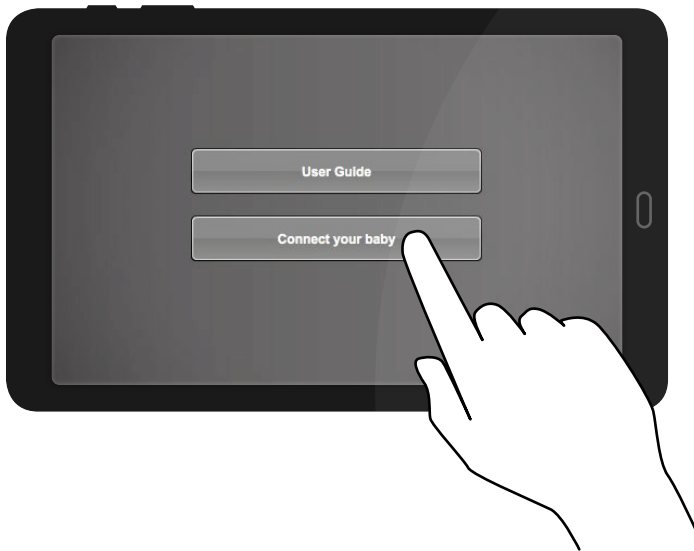

演示Drill mode中的全部功能
您应改选择肩难产场景培训

您可以在我们的网站上查看和下载最新的常见问题解答、用户指南和产品资料 limbsandthings.com

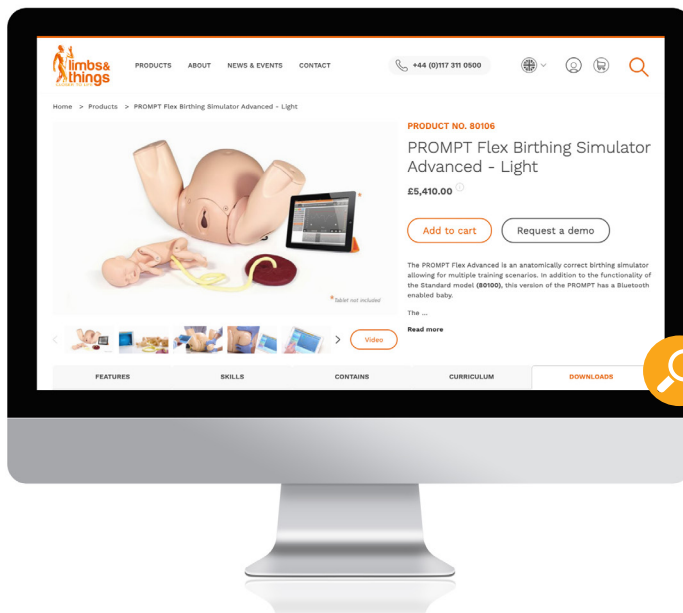

DOWNLOADS


如果您的问题在本文档中没有得到回答，请通过以下方法之一与我们的客户服务团队联系。
如果您提供以下信息，将非常有助于我们回答您的问题：

- 您婴儿的序列号（从80122开始，压印在婴儿的侧面）
- 您正在使用的平台和设备（如Windows 7 HP笔记本电脑）
- 您正在使用的软件版本（显示在“设置/系统信息”中）
- 婴儿的固件版本（显示在设置/系统信息中）



组装

添加/移除腹部皮肤

腹部可以很容易地添加/移除，以便于必要时将婴儿正确放置在骨盆内

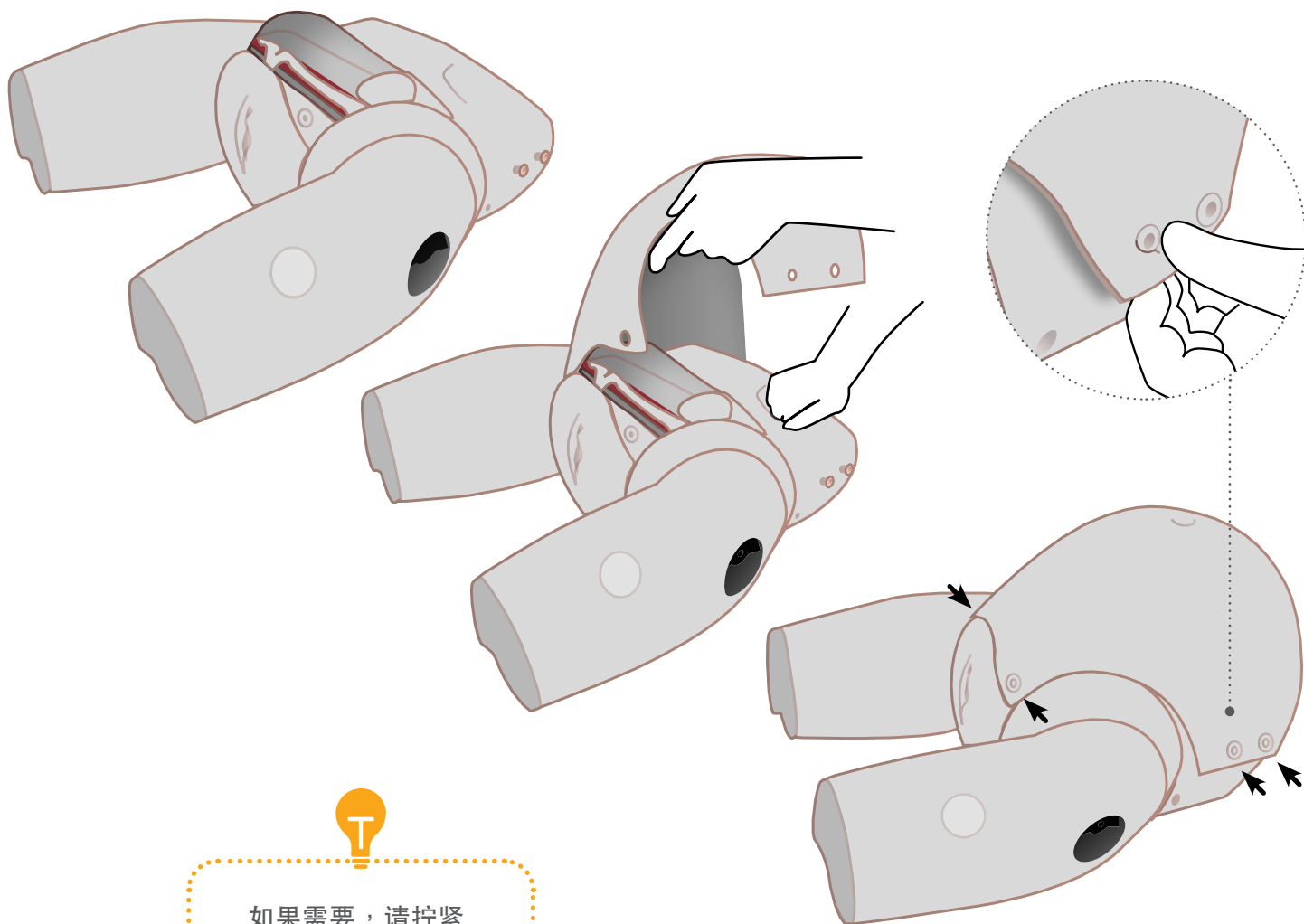

如果需要，请拧紧
固定带将模型固定
在桌面上。

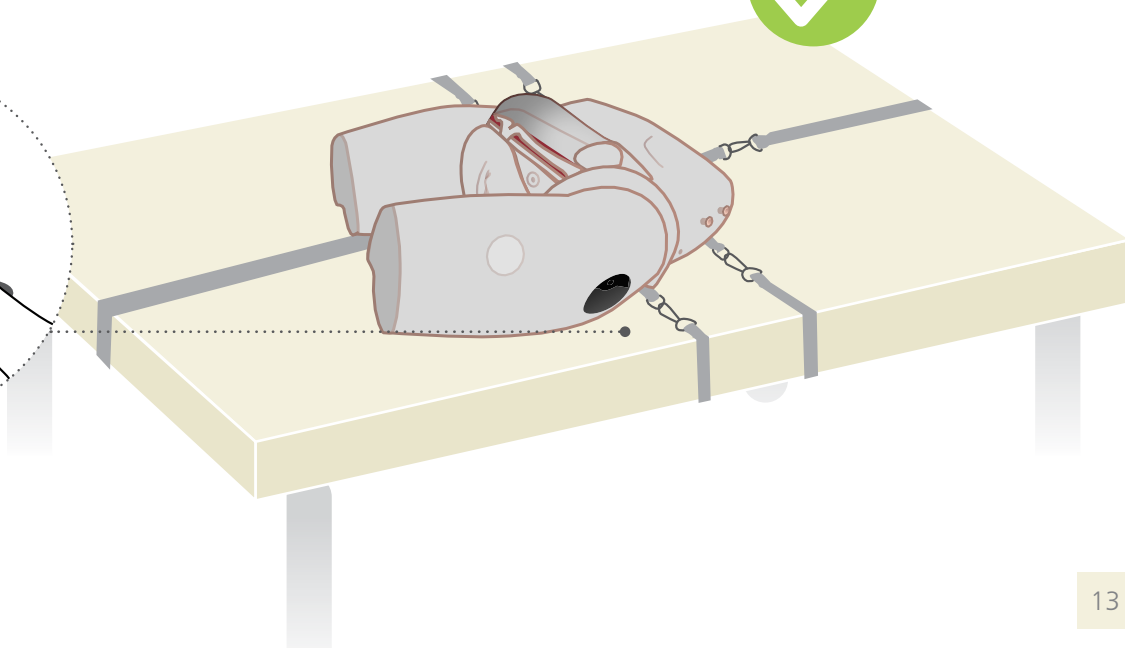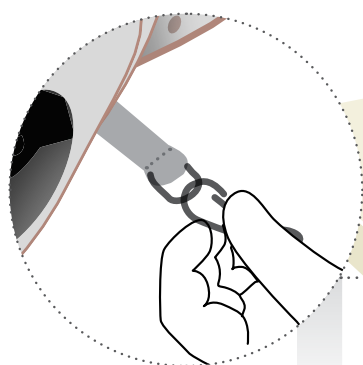


组装


添加/移除子宫颈

演习	需要子宫颈
正常分娩	✓
臀位分娩	✗
手术助产的阴道分娩	✗
肩难产	✗


1

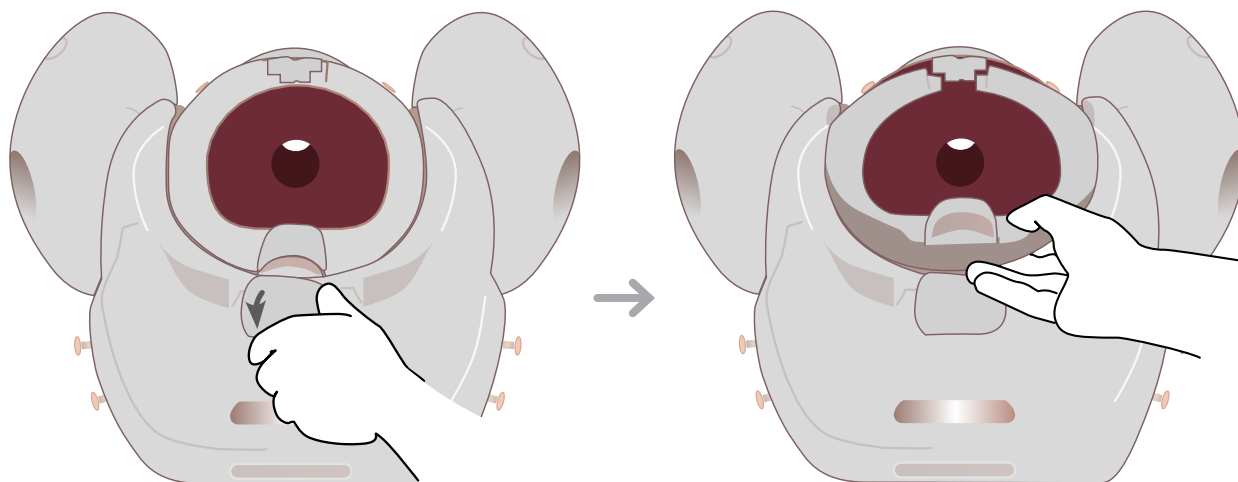

2

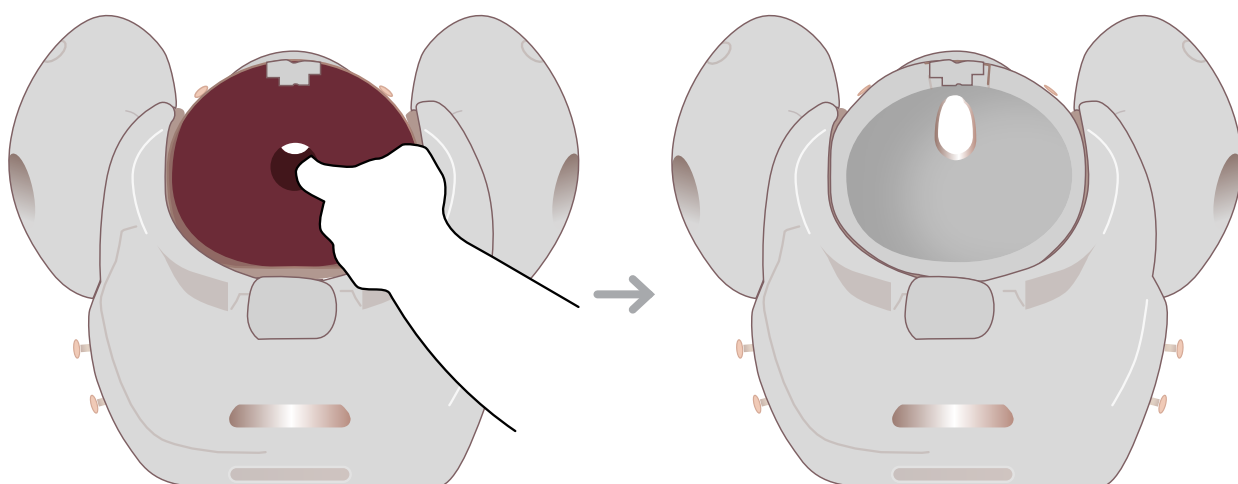


3

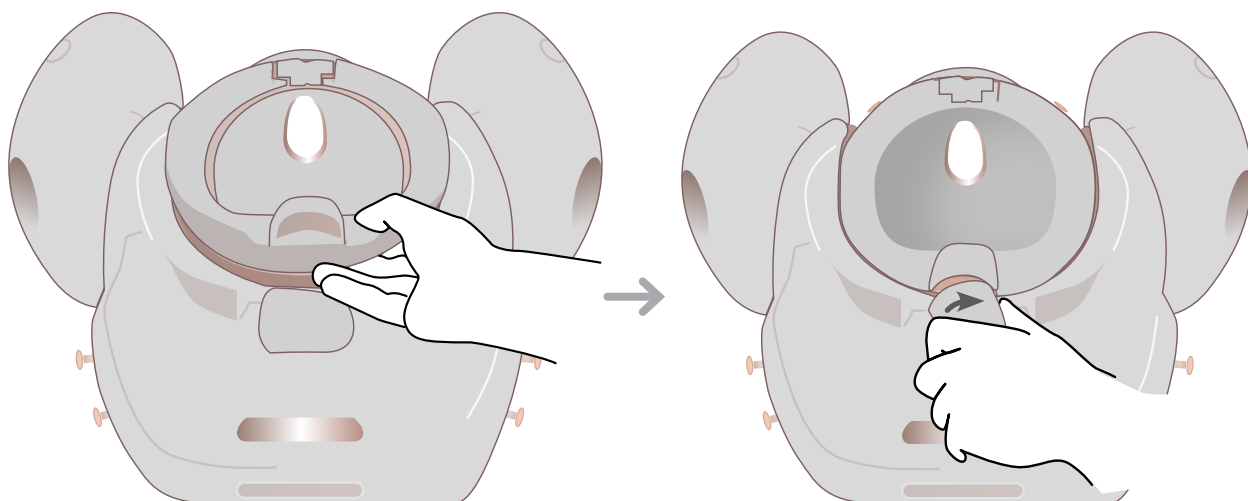

组装

组装
不同的训练场景演习

每次分娩练习前都要涂抹润滑剂







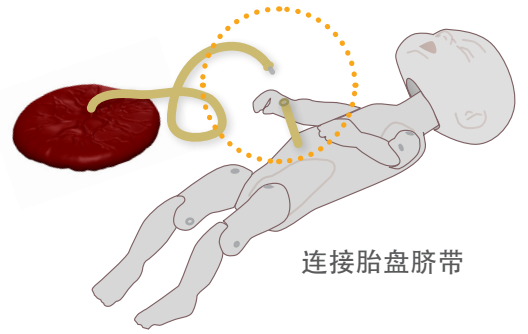



连接胎盘脐带

正常分娩


臀位分娩



肩难产

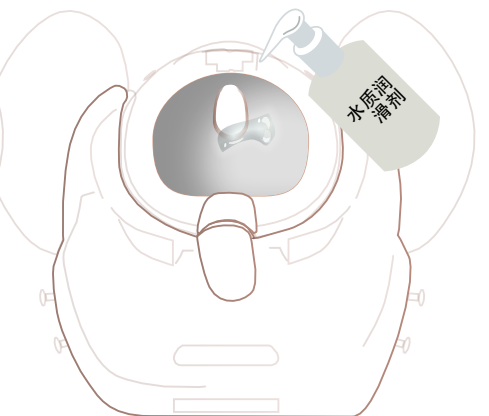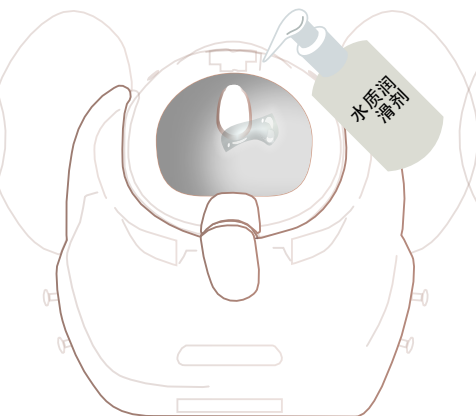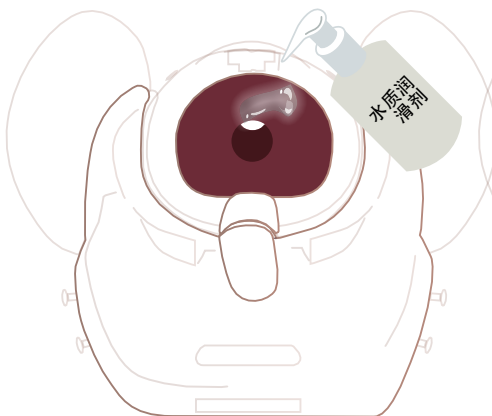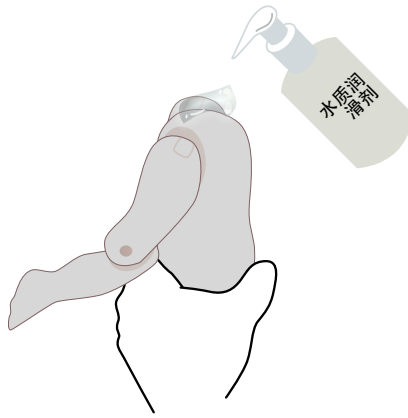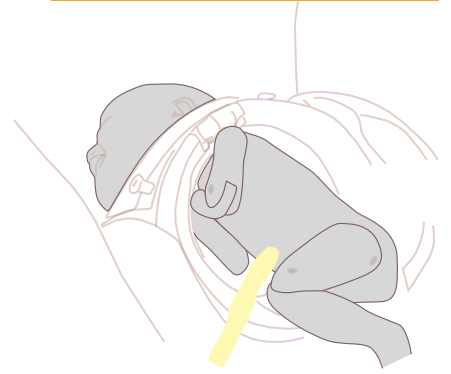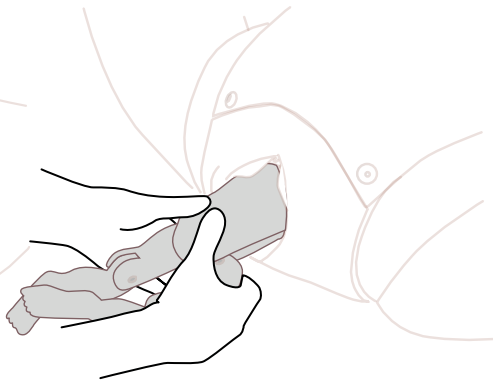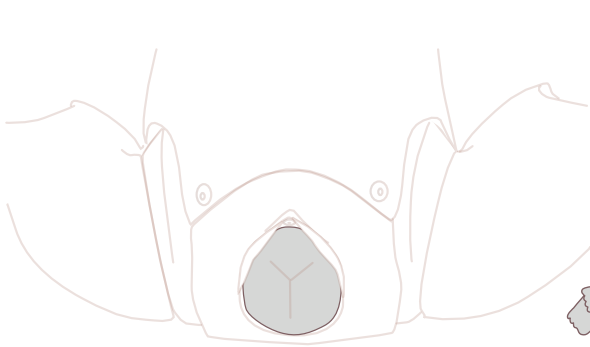


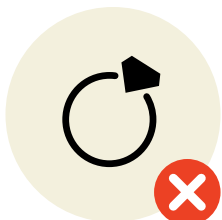





将婴儿推过骨盆，同时旋转婴儿模仿正常分娩的过程。

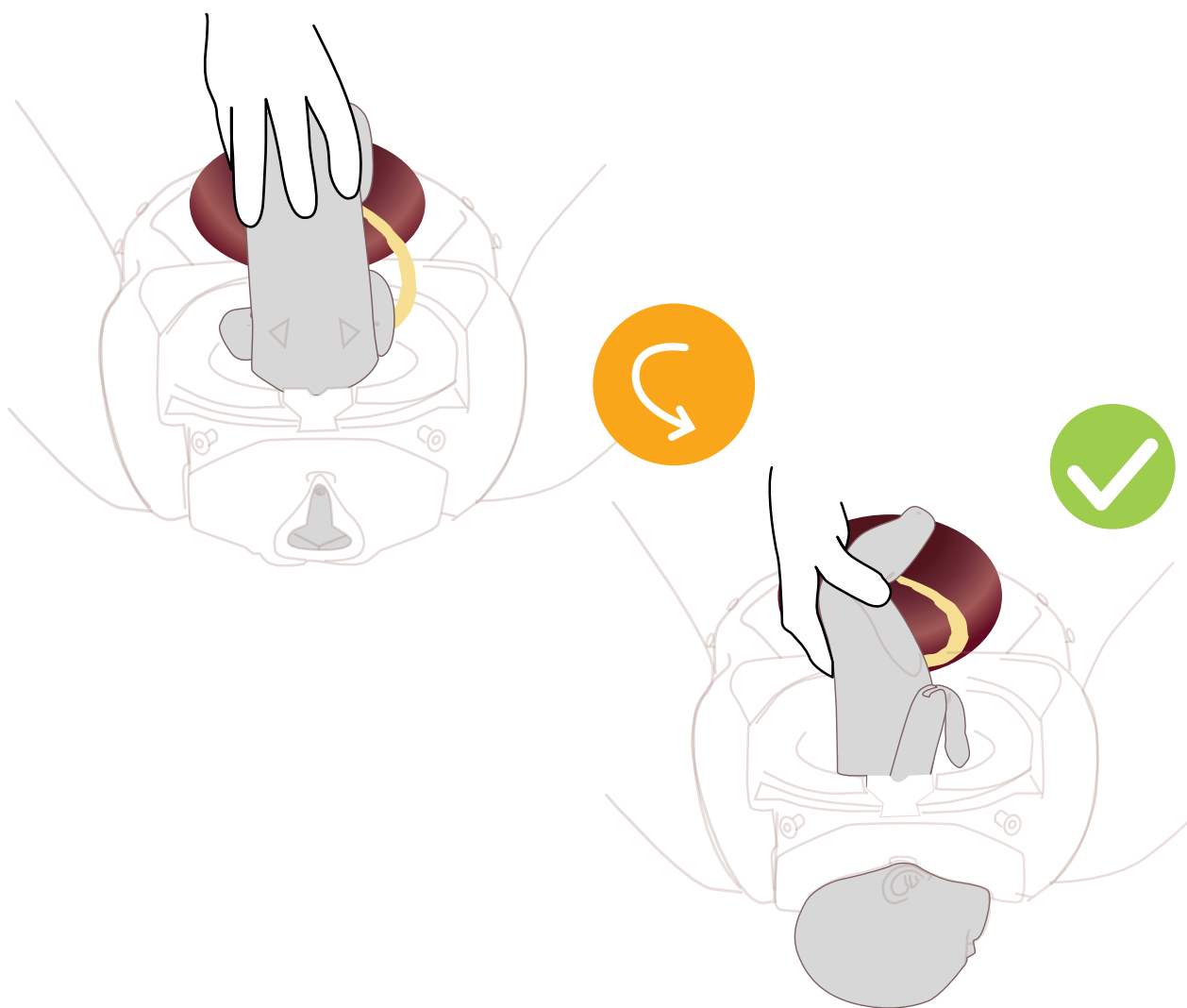

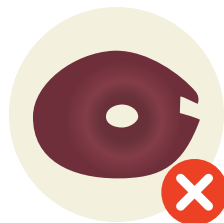
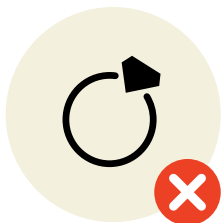


按压婴儿头部以模拟宫缩和母亲的用力
确保婴儿的手臂在分娩过程中保持弯曲

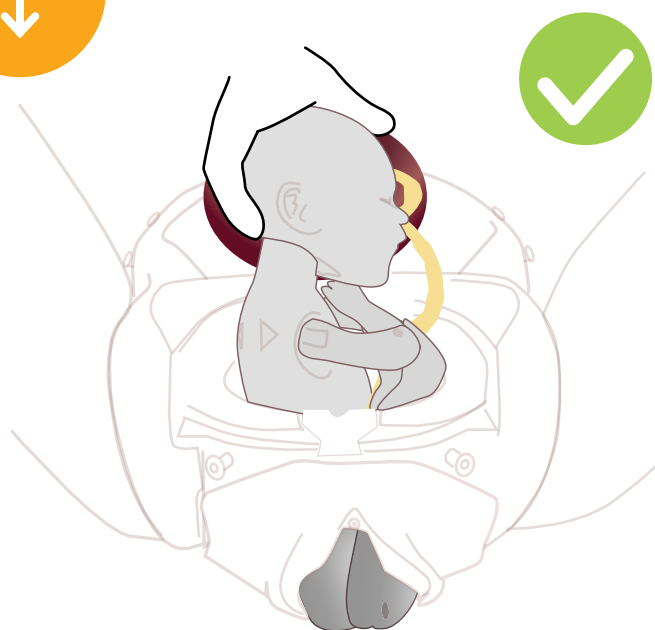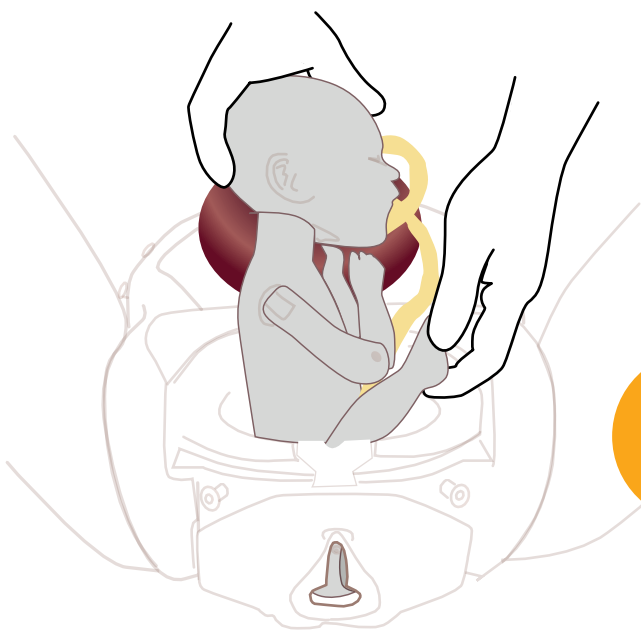

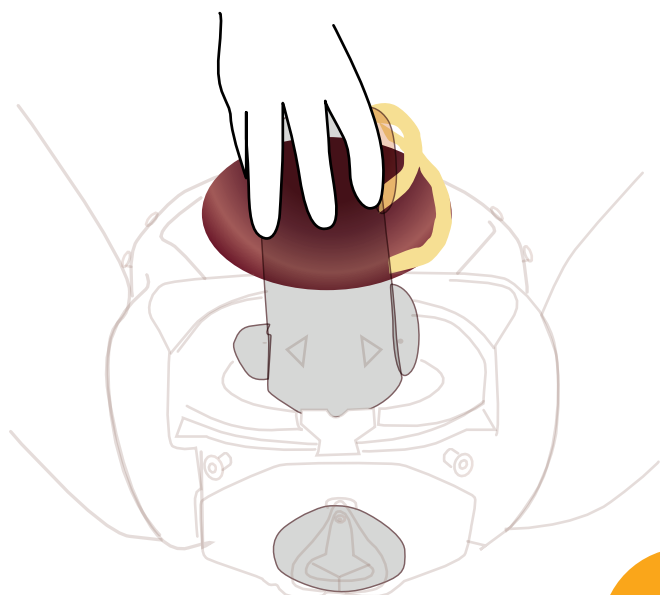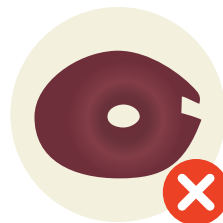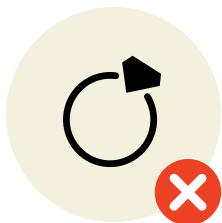


确保婴儿的前肩被楔入耻骨联合后面

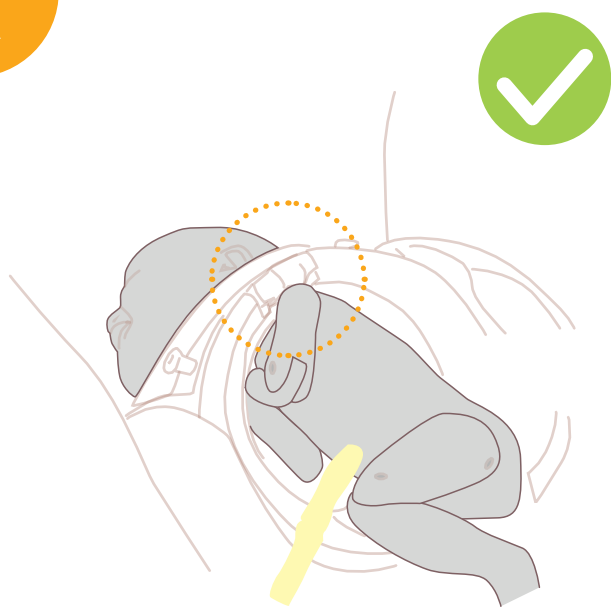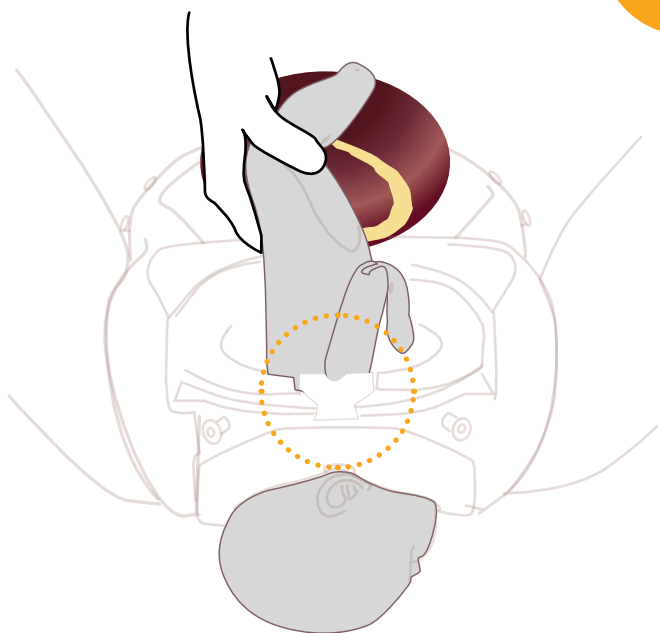

保养与维护



添加/移除会阴

每次培训课程结束后，用柔软的湿布清洁母婴表面所有的润滑剂。

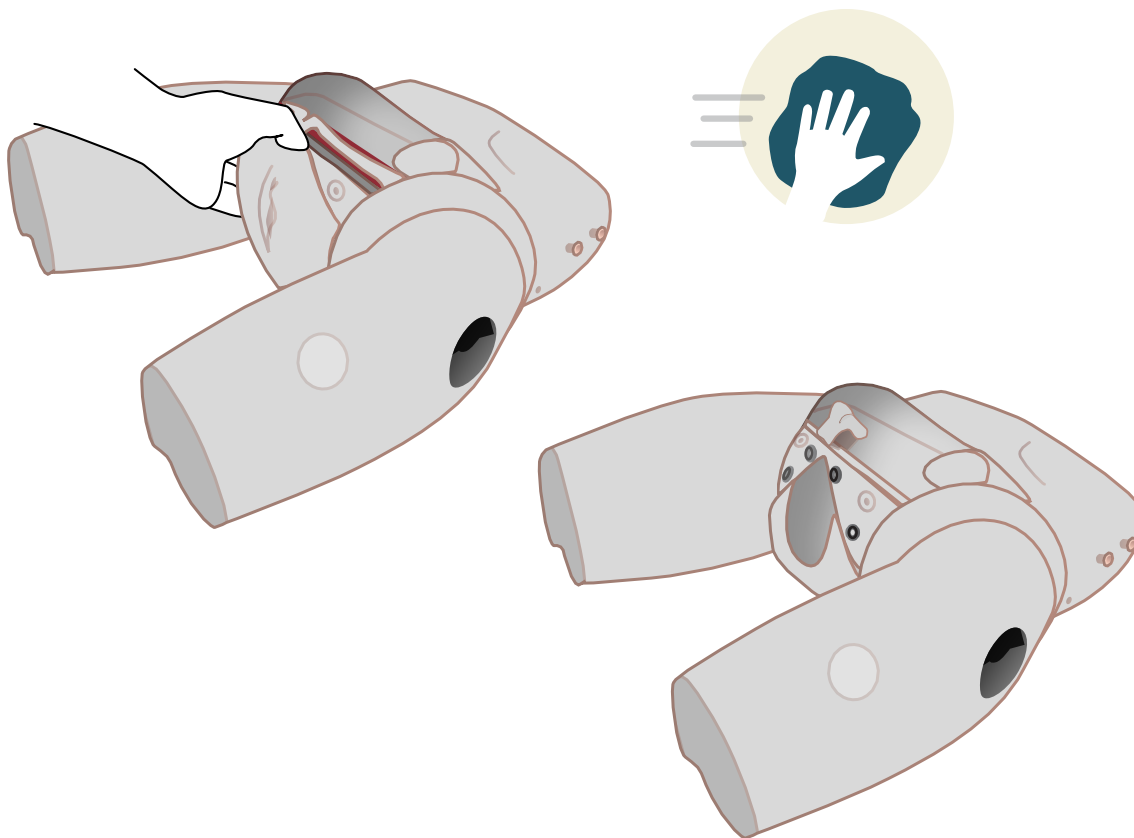

更换清理肌肉注射垫

收紧/松开大腿

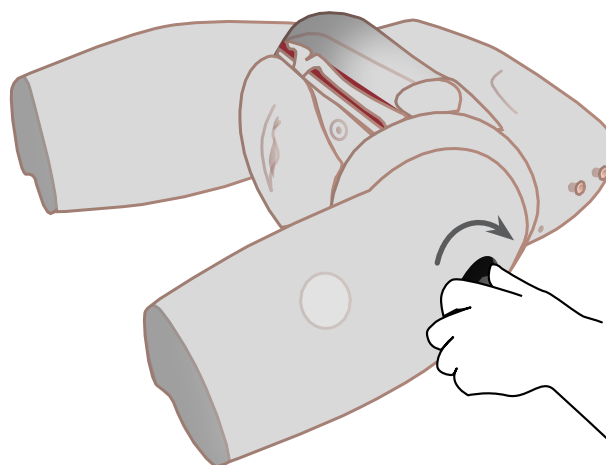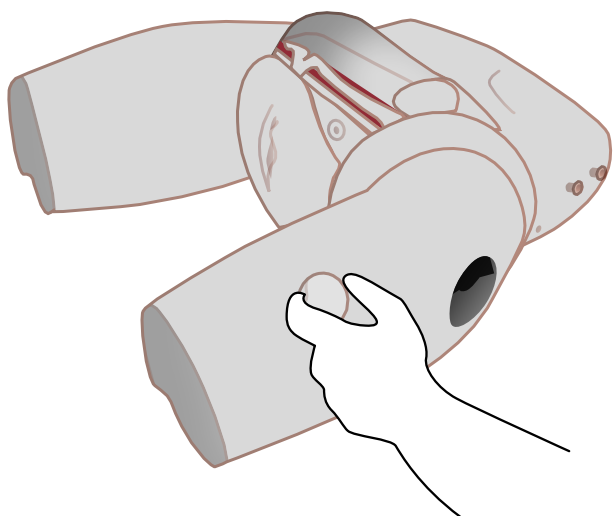

附加模块满足您培训特定的需要。


PROMPT
FLEX小腿



宫颈扩张
和消退模块



剖宫产模块

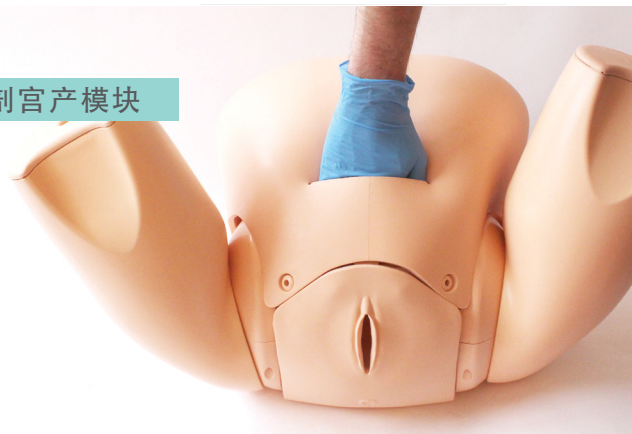


产后出血模块



子宫压迫缝合模块



宫颈环
扎术模块

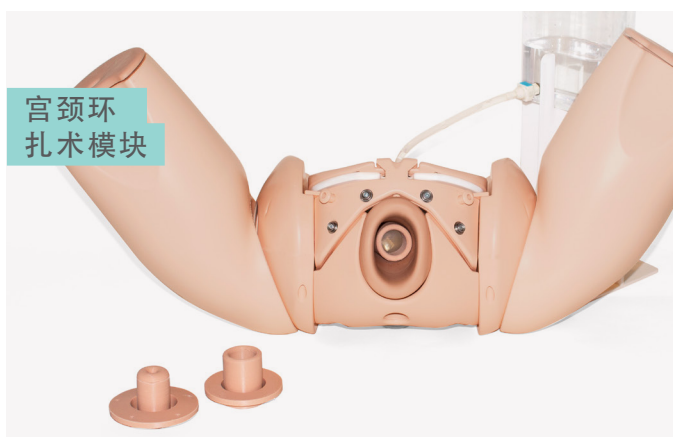

会阴修复及会阴切
开术模型

