




## 用户指南

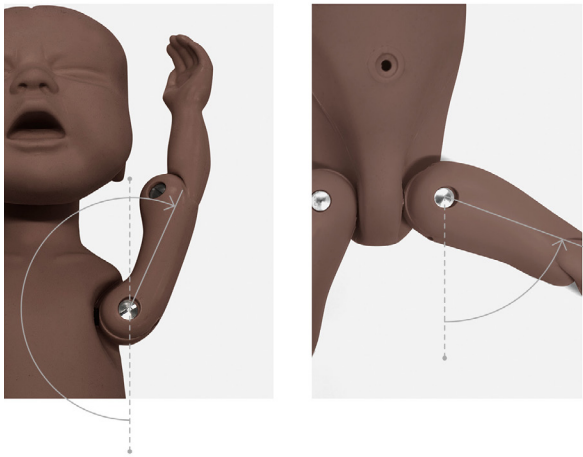

## PROMPT FLEX 分娩培训模型

标准版

该产品有两种肤色可供选择，浅色和深色

80100

80200

如果您想了解更多关于技能培训产品请访问

[limbsandthings.com](https://limbsandthings.com)

Sussex Street, St Philips, Bristol, BS2 0RA, UK | [sales@limbsandthings.com](mailto:sales@limbsandthings.com) | +44 (0) 117 311 0500

## 目录索引

产品包含	3
安全与清洁说明	4
组装	5
• 添加/移除腹部	5
• 安装/移除子宫颈	6
• 设置不同的训练场景演习	7
培训	8
• 正常分娩	8
• 臀位产	9
• 肩难产	10
清洁和储存	11
• 添加/移除会阴	11
• 更换/清洁肌肉注射垫	11
• 收紧/松开大腿	11

请观看我们的视频



请访问该网站  
[limbsandthings.com](http://limbsandthings.com)


或优酷频道  
[https://list.youku.com/albumlist/show/id\\_52483167](https://list.youku.com/albumlist/show/id_52483167)

# 产品包含

分娩母体

80120


80220

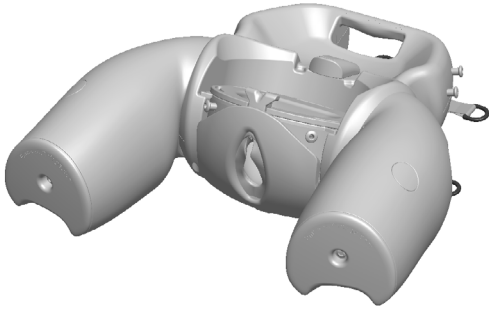

标准版婴儿


80121

80221

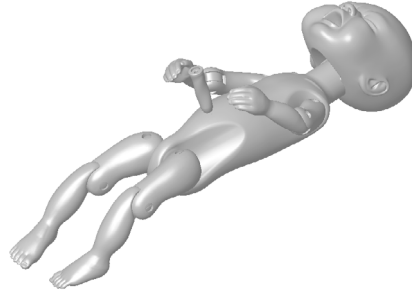

胎盘

80123

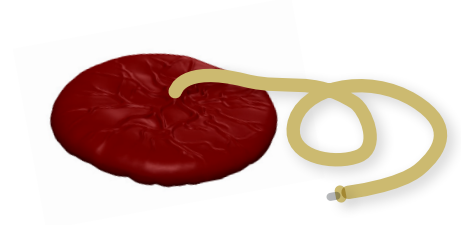

腹部

80124


80224



会阴和产道


80125

80225

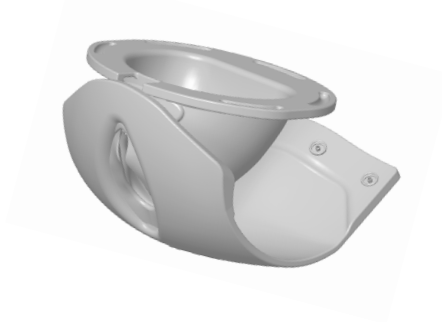

子宫颈

80126

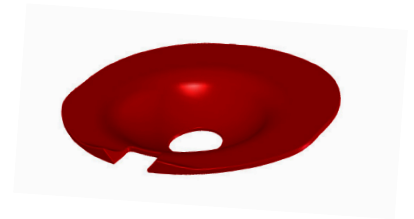

耻骨架


80107

80207



固定带

80130

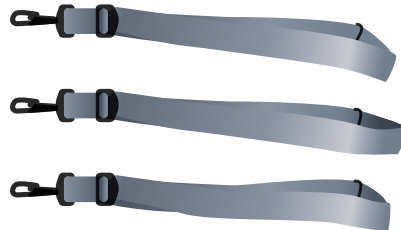

水质润滑剂

10193



轮式手提箱

01000



## 安全与清洁指南

在使用PROMPT FLEX分娩培训模型标准版之前请仔细阅读安全说明

### 可以做



请遵循所有指南。  
保留这些指南。  
注意所有警告

只能使用水质润滑剂和模拟血，  
比如本产品提供的这种。  
使用我们不推荐的液体可能会减  
弱或损坏硅胶



始终戴手套，取下所有首饰。  
指甲和戒指等尖锐物会导致硅胶零件损坏

每次分娩练习前请务必将婴儿和产  
道润滑好。



每次训练后请用潮湿柔软的布或海绵，  
温水和中性洗涤剂清洗此模型。  
清除母婴表面  
所有多余的润滑剂。

### 储存与运输



在运输和储存期间，  
始终确保产品正确包装和固定，  
以防止人身伤害或产品损坏。

### 不可以做



请勿将本产品安装在任何热源附近，  
不要将其暴露于明火或在裸露的火源  
附近使用。  
请勿在本产品附近或在该产品本身上  
使用易燃溶剂。

请勿使用任何非制造商出产的附件。



使用本产品时不要佩戴任何首饰。

请勿拆卸产品或尝试维修有故障  
的单元部件，请将产品退还给  
Limbs & Things进行评估和维修。




使用过程中如果婴儿或胎盘润滑剂涂抹的不足，  
可能会损坏产道或宫颈。



## 组装

### 添加/移除腹部皮肤

腹部可以很容易地添加/移除，以便于必要时将婴儿正确放置在骨盆内

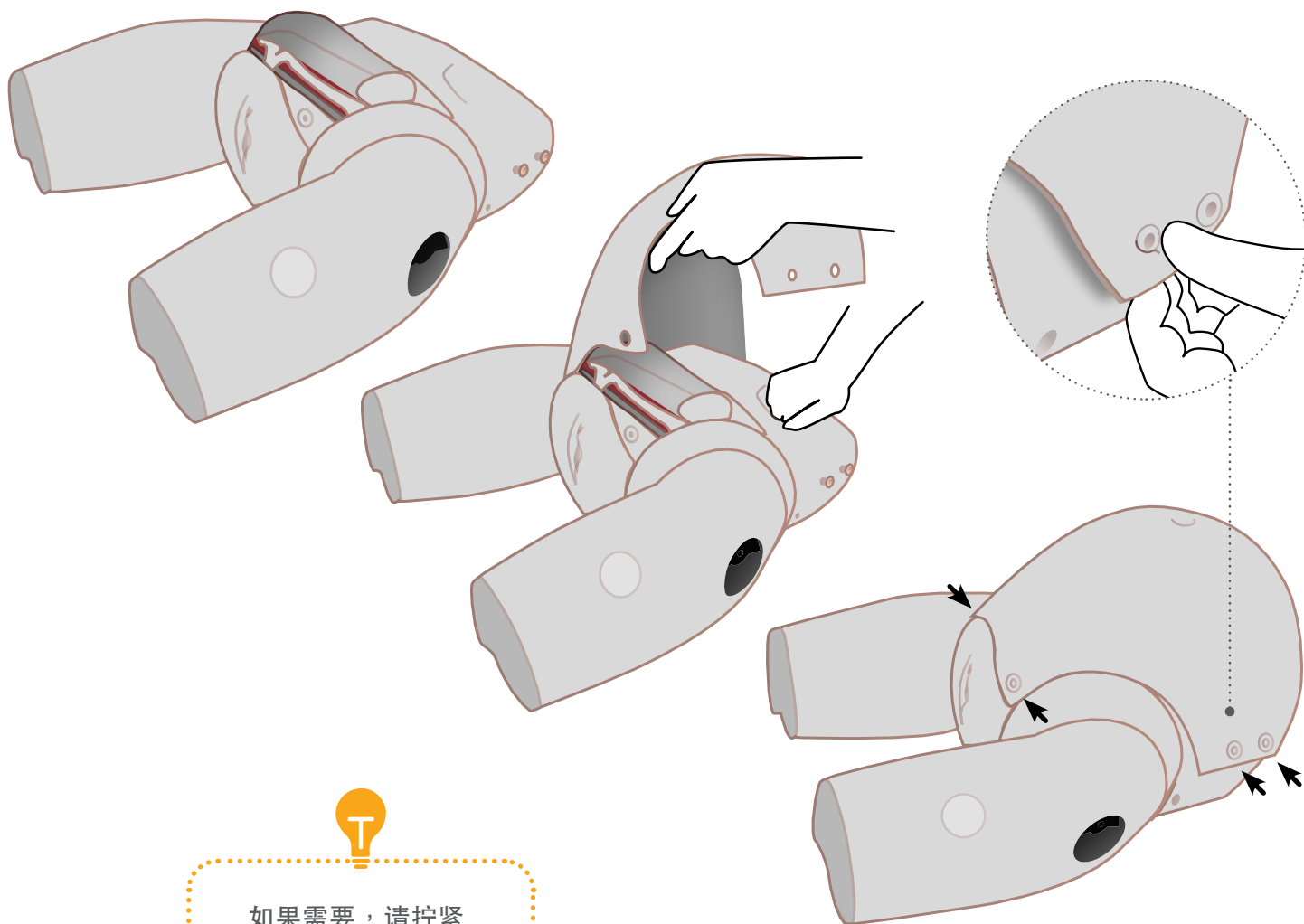

如果需要，请拧紧  
固定带将模型固定  
在桌面上。

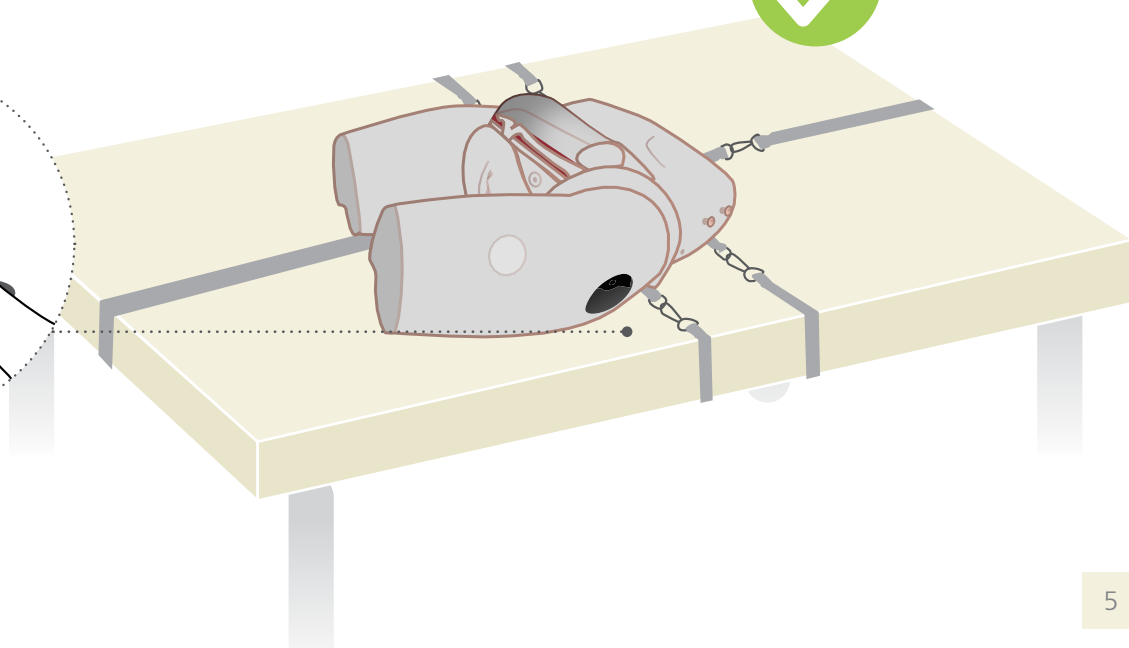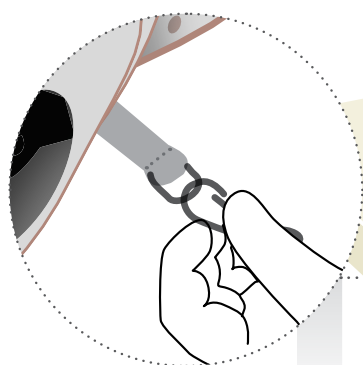


# 组装


## 添加/移除子宫颈

演习	需要子宫颈
正常分娩	✓
臀位分娩	✗
手术助产的阴道分娩	✗
肩难产	✗


1

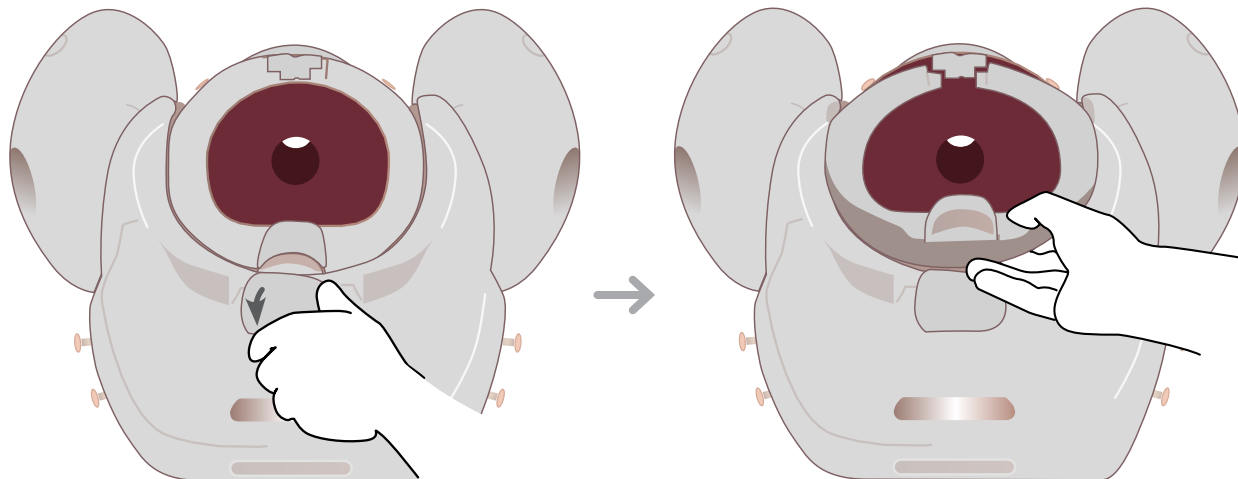

2

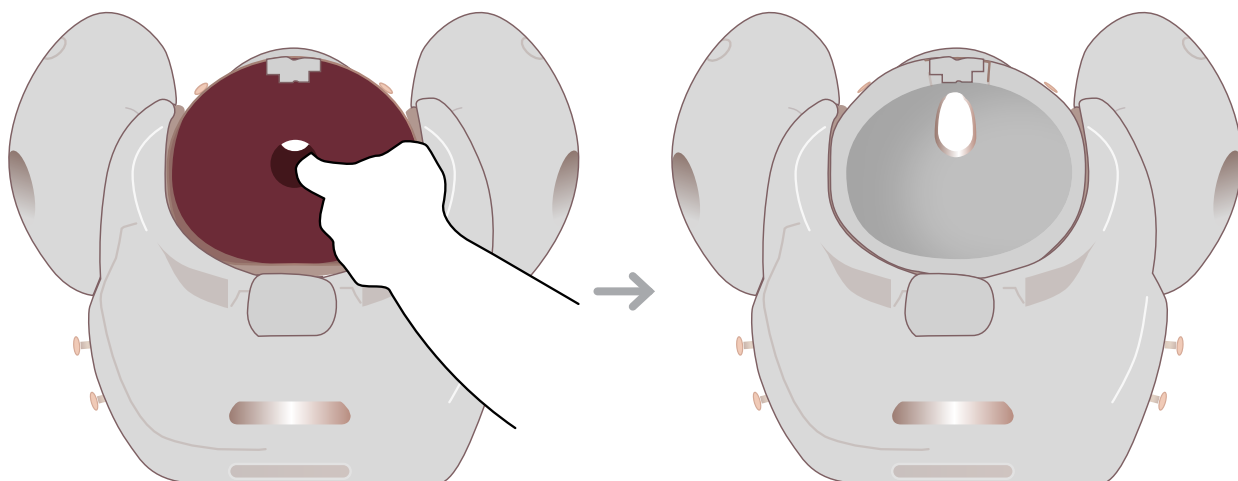


3

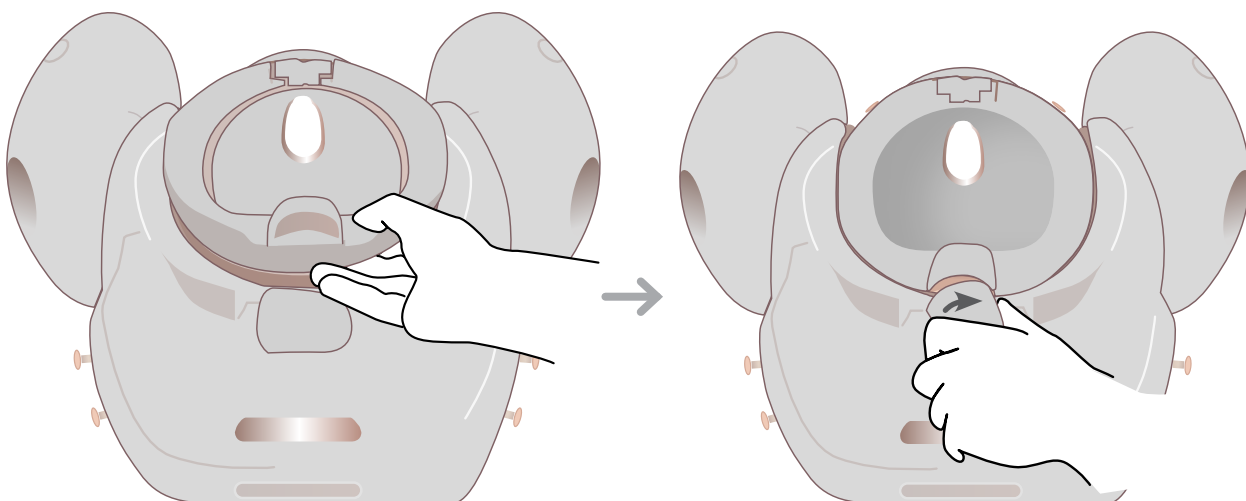

# 组装

组装  
不同的训练场景演习







每次分娩练习前都要涂抹润滑剂

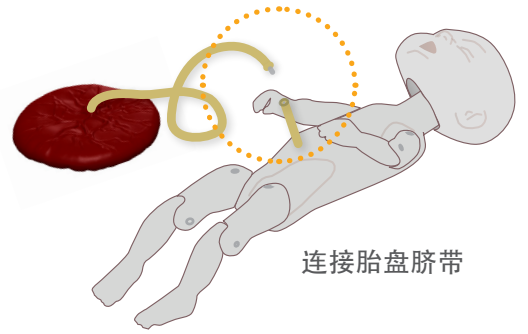


## 正常分娩


## 臀位分娩

## 肩难产

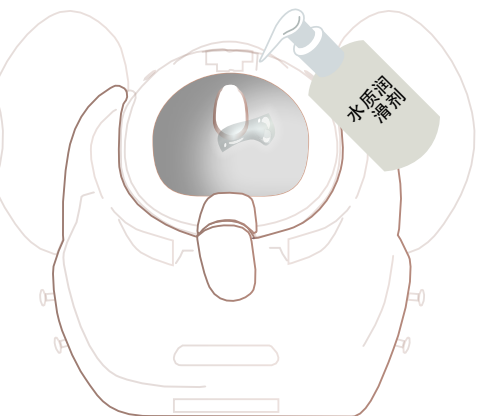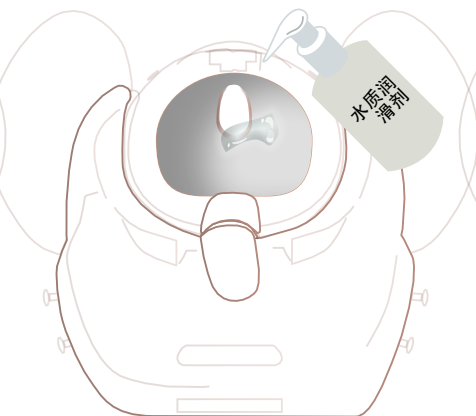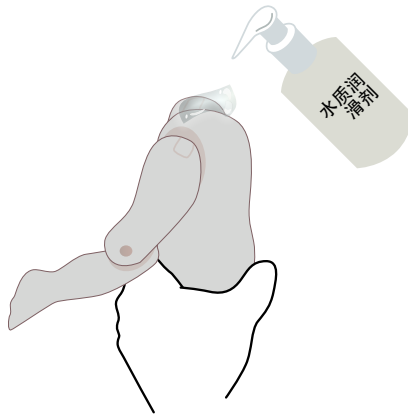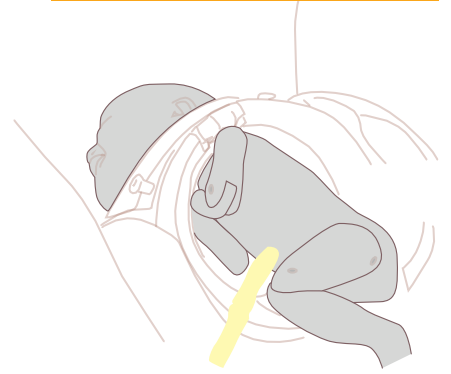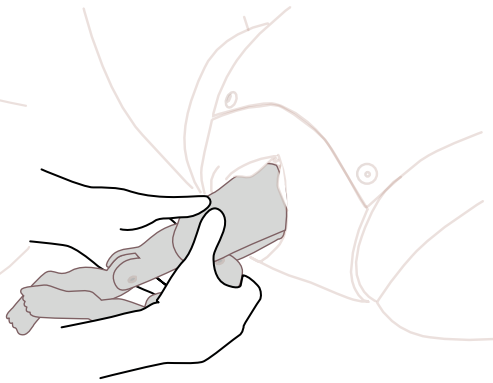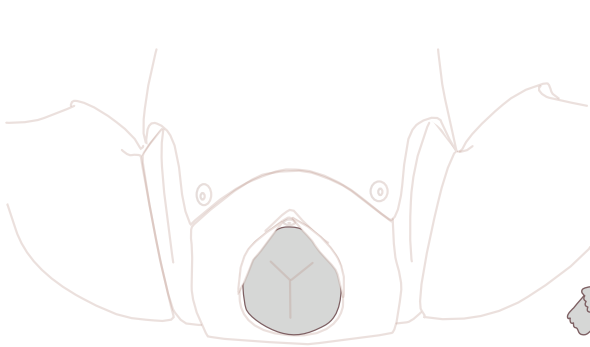


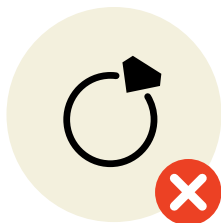



将婴儿推过骨盆，同时旋转婴儿模仿正常分娩的过程。



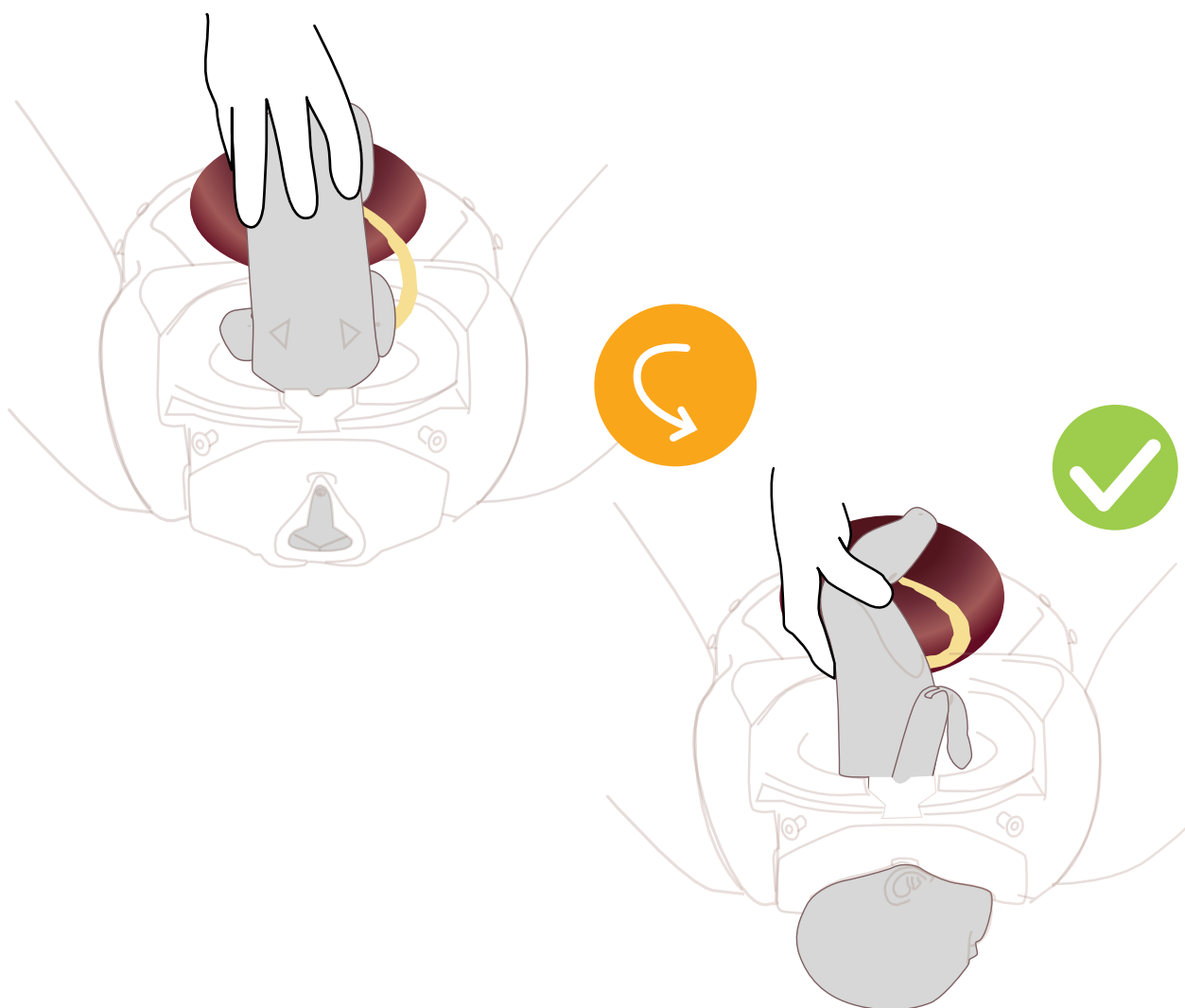





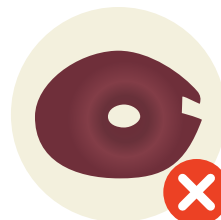


按压婴儿头部以模拟宫缩和母亲的用力  
确保婴儿的手臂在分娩过程中保持弯曲

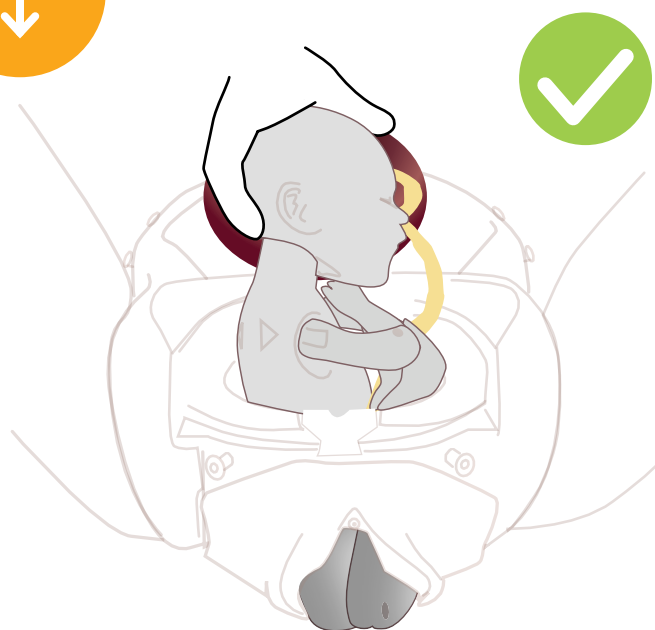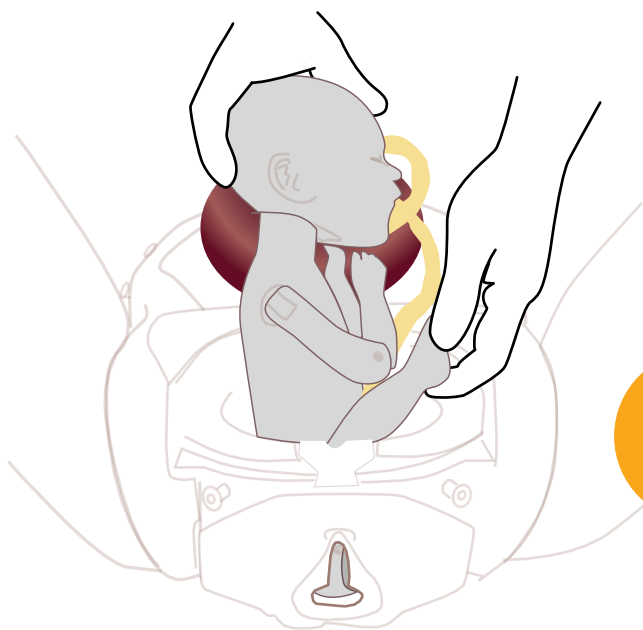

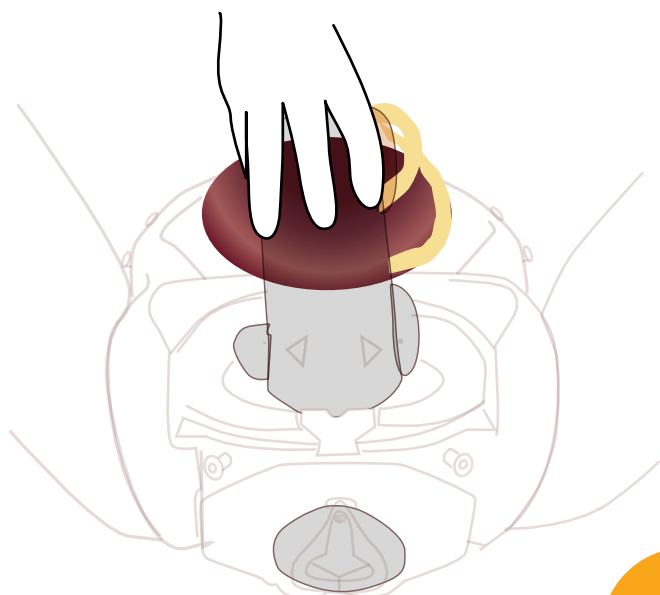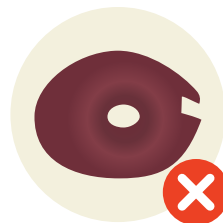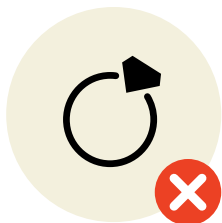


⚡ 确保婴儿的前肩被楔入耻骨联合后面

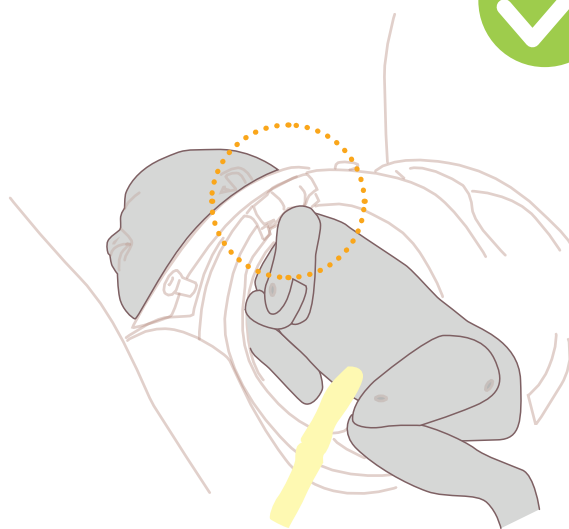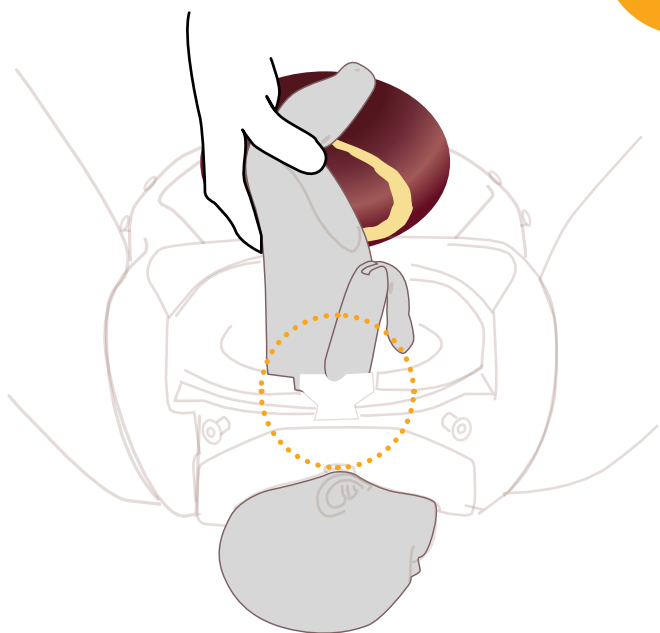

## 保养与维护



### 添加/移除会阴

每次培训课程结束后，用柔软的湿布清洁母婴表面所有的润滑剂。

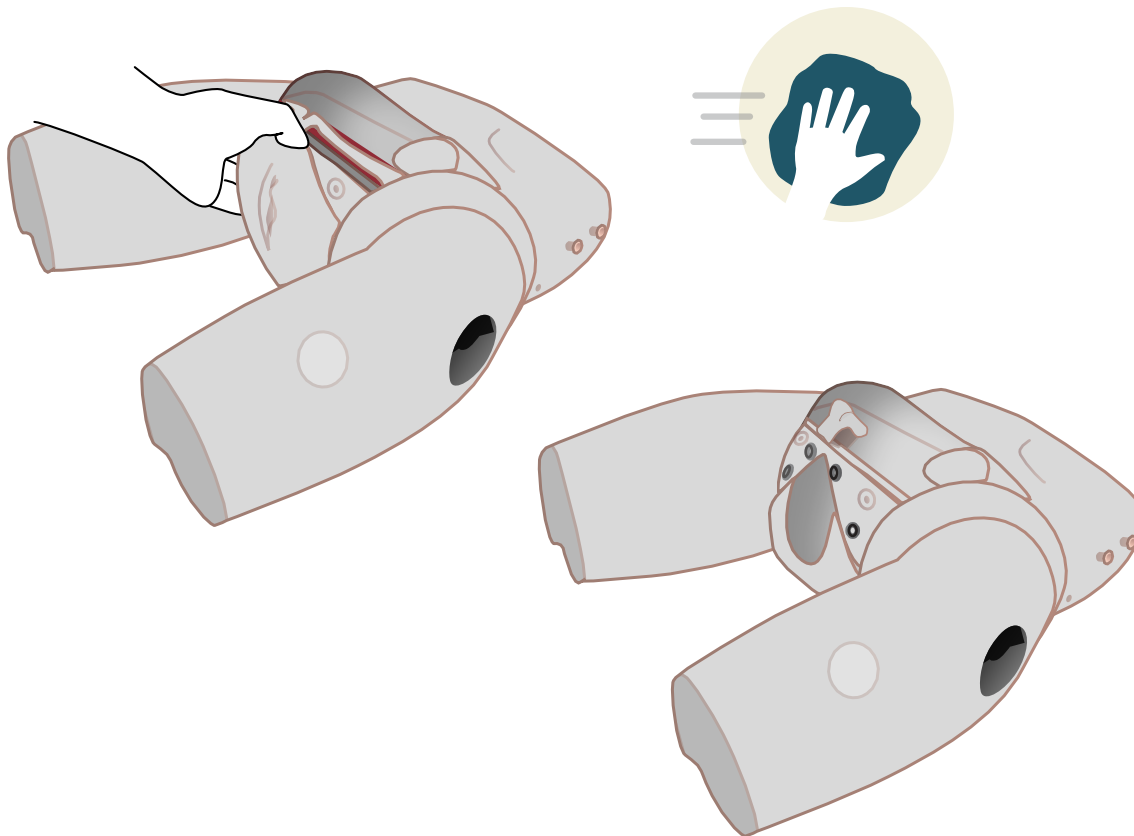

### 更换清理肌肉注射垫

### 收紧/松开大腿

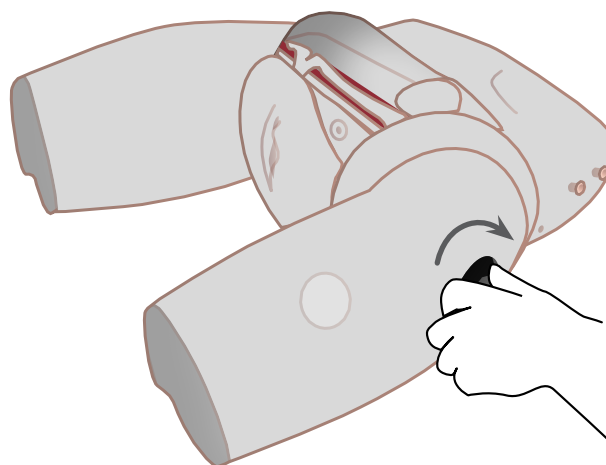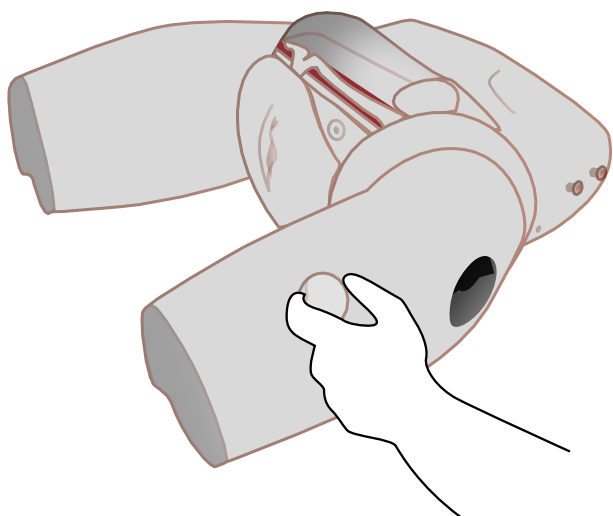

附加模块满足您培训特定的需要。


PROMPT  
FLEX小腿



宫颈扩张  
和消退模块



剖宫产模块

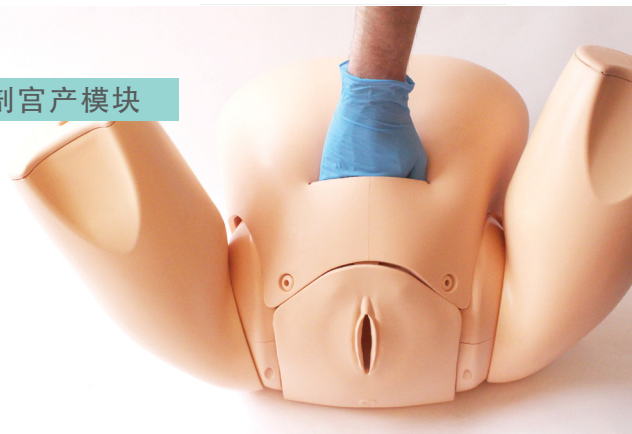


产后出血模块



子宫压迫缝合模块



宫颈环  
扎术模块

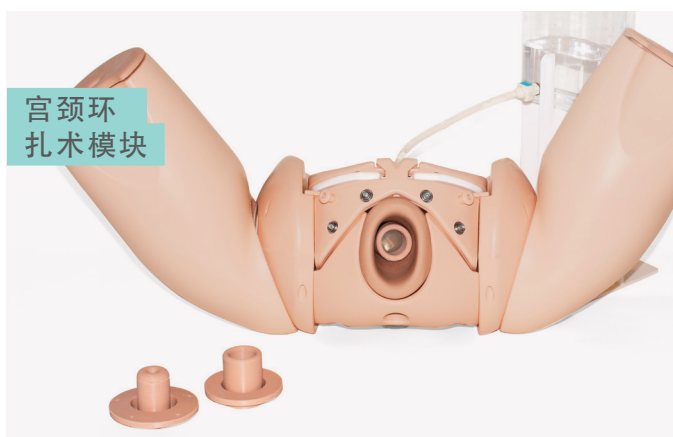

会阴修复及会阴切  
开术模型

